

Urinabsauger **Uri-Comfort**

Der Urinabsauger Uri-Comfort wurde für Menschen entwickelt, die Schwierigkeiten haben, zur Toilette zu gehen. Er ist wahlweise mit einem Adapter für Männer oder Frauen ausgestattet. Sobald der eingebaute Sensor den Abfluss von Urin bemerkt, wird dieser abgesaugt. Der Uri-Comfort kann genutzt werden, wenn der Harndrang vom Betroffenen gespürt und wenn ihm die Verantwortung für den Einsatz überlassen werden kann. Außerdem muss er in der Lage sein, die entsprechenden Hand- und Armbewegungen durchzuführen oder eine Pflegeperson zur Hilfe zu rufen.

Anwendungsbeispiele

- Windelbenutzer, die Harndrang spüren können und keine Windel (mehr) benutzen wollen.
- Menschen, die nicht ohne Hilfe zur Toilette gelangen, aber ohne fremde Hilfe urinieren wollen.
- Patienten, die das Bett nicht verlassen können, weil sie z.B. einen Knochenbruch haben.
- Männer, die wegen einer Prostatavergrößerung viele Male pro Nacht zur Toilette müssen.
- Menschen, die wegen Nervenerkrankungen wie z.B. MS, ALS, Parkinson oder wegen Wirbelsäulenverletzungen in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt sind.
- Betroffene, die durch Beschwerden des Stütz- und Bewegungsapparats in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt sind (Rheuma, Arthritis, Morbus Bechterew, Glasknochenkrankheit und vieles anderes mehr)

Die Reihe von Beispielen lässt sich beliebig ausbauen bis hin zum Lastwagenfahrer, der gerne anhalten möchte, aber alle Parkplätze sind belegt.

Anwendungsmotive

Die Gründe für den Einsatz des Uri-Comfort sind ebenfalls sehr zahlreich:

- Manche fühlen ihre Würde verletzt, wenn sie für jedes Wasserlassen auf die Hilfe anderer angewiesen sind.
- Andere Betroffene möchten die



Für Männer



Für Frauen

Pflegeperson nicht in ihrer Nachtruhe stören.

- Oft spielt auch der Widerwille gegen Katheter oder Windeln eine Rolle.
- Pflegedienste oder Altersheime können Personalkosten sparen.
- Auch die Vorbeugung ist wichtig: Ein Großteil der Knochenbrüche bei Senioren ist auf den – meist nächtlichen – Toilettengang zurückzuführen.

Daten


Maße (BxLxH):
23,3 cm x 38 cm x 27,5 cm
Gewicht: 5 kg
Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Energieverbrauch: 115 W beim Absaugen
Netzkabel: ca. 2,5 m Länge

Grundausrüstung

Uri-Comfort Urinabsauger, Basisset inkl. Adapter (wahlweise für Männer oder Frauen) mit Flüssigkeitssensor mit Verschmutzungsanzeige, 3-Liter-Auffangbehälter mit Überlaufwarnung, Geruchsfilter mit Wechselanzeige.

Zubehör

- zusätzlicher Adapter für Männer
- zusätzlicher Adapter für Frauen

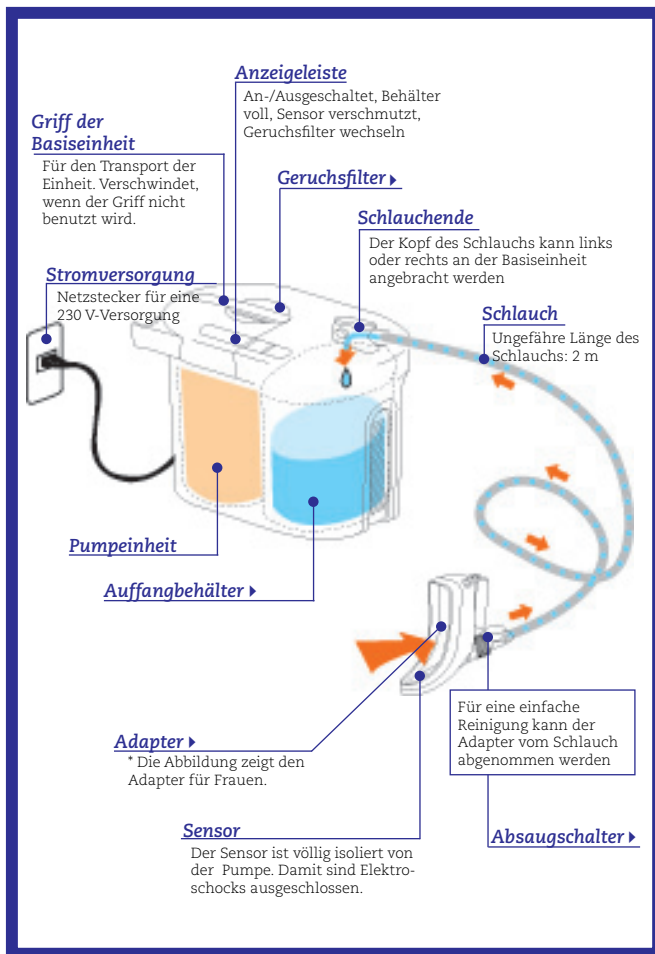

Funktionsweise

Wenn der Sensor in dem Adapter Urinfluss bemerkt, saugt die Pumpe den Urin in den Tank. Der Absaugprozess wird automatisch gestoppt, wenn der Sensor keinen Urin mehr erkennt. Alternativ kann die Pumpe über den Absaugschalter bedient werden, bevor mit dem Wasserlassen begonnen wird.

Adapter

Bei längerem Gebrauch, z.B. während des Schlafs, kann der Adapter für Männer mit einem Silikon Aufsatz versehen werden. Der Adapter für Frauen berührt den Körper mit seiner runden Form mit weicherem Material.



Absaugschalter

Am Anfang kann die Pumpe mit dem Absaugknopf manuell gestartet werden. Dies dient der leichteren Gewöhnung. So kann auch bei Besorgnis um die Dichtigkeit verfahren werden. Auch wenn der Sensor verschmutzt ist, kann der Absaugknopf zum Start der Pumpe benutzt werden.



Geruchsfilter

Die Basiseinheit beinhaltet einen fotokatalytischen Geruchsfilter. Der Filter kann nach dem Waschen wieder gebraucht werden. Ein Lämpchen zeigt an, wenn der Filter gewaschen werden sollte.



Auffangbehälter

Der Behälter hat eine Aufnahmefähigkeit von rund drei Litern und ist damit groß genug für die Tageskapazität von Urin bei einem durchschnittlichen Erwachsenen. Der Behälter braucht nur einmal pro Tag geleert zu werden. Der Füllstand kann von außen kontrolliert werden. Darüber hinaus weist ein Warnlicht darauf hin, wenn der Behälter voll ist. Der Behälter kann leicht herausgenommen, geleert und gereinigt werden.

