

RehaNorm GmbH & Co. KG

**Gebrauchsanweisung
für den Autosicherheitssitz
Tony Plus**



Sehr geehrter Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Autosicherheitssitz Tony Plus.

Bevor Sie allerdings den Autosicherheitssitz benutzen wollen, sollten Sie erst einmal aufmerksam die Bedienungsanleitung durchlesen und unsere Hinweise beachten. So werden Sie den Tony Plus optimal nutzen und Ihrem Kind höchste Sicherheit bieten können.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch!

EU-Konformitätserklärung für Medizinprodukte (nach Artikel 19 und Anhang IV der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) vom 5. April 2017 über Medizinprodukte):

Wir erklären hiermit, dass das Produkt den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) vom 5. April 2017 über Medizinprodukte entspricht. Die Herstellung geschieht unter Kontrolle eines Qualitätsmanagementsystems nach EN ISO 9001 unter Berücksichtigung der Regelungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) vom 5. April 2017 über Medizinprodukte.

Hersteller:

RehaNorm GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 50, 55411 Bingen-Kempton

Telefon (06721) 906-0

Telefax (06721) 906-66

www.rehanorm.de

Angaben im Sinne der Dritten Verordnung über straßenverkehrsrechtliche Vorschriften vom
05. Juni 1990:

Der Tony Plus ist verwendbar als Rückhaltesystem mit folgenden Bestimmungen:

Nach vorne gerichtete Rückhaltevorrichtung für Kinder

Nicht integriert

Typ des Gurtes: 3-Punkt-Gurt (für Erwachsene)

Sonstige Ausführungen: Kompletter Sitz

Fabrik- und Handelsmarke Tony Plus

Herstellerbezeichnung der Rückhalteeinrichtung für Kinder Tony Plus

Stand: 07/2021

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
1. Der Tony Plus	4
2. Zubehör für den Tony Plus	5
3. Einbau	6
3.1 Grundausstattung	
4. Einstellungen	6
4.1 Einstellung der Länge des Schrittgurtes und Einstellung der Höhe des Brustpolsters	
4.2 Einstellung der Sitzneigung	
4.3 Einstellung der Kopffixierung	
5. Gebrauch	8
6. Reinigung des Tony Plus	10
7. Fachhändler-Bestätigung	11
8. Gewährleistung	12

Wichtige Sicherheitshinweise zuerst:

! Der Kinderschalensitz Tony Plus darf nur in Verbindung mit dem 3-Punkt-Gurt Ihres Fahrzeuges benutzt werden.

! Achten Sie beim Anlegen der Gurte darauf, dass diese straff gespannt und nicht verdreht sind.

! Wurde der Kinderschalensitz bei einem Unfall stark belastet, ist es ratsam, ihn auszuwechseln.

! Grundsätzlich darf der Kinderschalensitz keinen Umgebungstemperaturen über 50°C ausgesetzt werden, wie beispielsweise in der Nähe von offenem Feuer oder in der Sauna.

! Bedenken Sie, dass Sie bei Veränderung der Rückhalteeinheit in irgendeiner Weise ohne Genehmigung der zuständigen Behörde Ihr Kind zusätzlichen Gefahren aussetzen können.

1. Der Tony Plus

Der Kindersicherheitssitz Tony Plus ist geeignet für den Autotransport von behinderten Kindern und Jugendlichen.

Die maximale Belastung sollte aber 120 kg nicht überschreiten.

Eine körpergerechte Einstellung in Verbindung mit dem individuell erforderlichen Zubehör sichert eine stabile und korrekte Sitzposition, wobei der 3-Punkt-Gurt Ihres Fahrzeuges für die optimale Rückhaltesicherheit sorgt.





Hinweis:

! Der Kindersicherheitssitz Tony Plus darf nur in Verbindung mit dem 3-Punkt-Gurt Ihres Fahrzeuges benutzt werden

2. Zubehör für den Tony Plus

Durch diese nachfolgend aufgelisteten Zubehörausstattungen können Sie Ihren Tony Plus optimal an die Bedürfnisse Ihres Kindes anpassen und seine Sicherheit erhöhen.

- Abklappbare Rumpfelotten rechts und/oder links
- Abklappbare Oberschenkelführung rechts und/oder links
- Unterlegkeil
- Sicherungsgurte (hinten)
- Klippverschlüsse (hinten)
- Führungslasche rechts und/oder links
- Fußbank (höhenverstellbar)
- Alu-Kopfstütze
- Kopfstütze, einklettbar, aus Schaumstoff
- Hinterhauptpolster
- Brustgurt
- Therapietischplatte
- Vierpunkt- oder Fünfpunktgurt
- Beckengurt mit Pressverschluss
- Lendenwirbel-Stützpelotte
- Sitzkeilkissen nach Maß
- Brustschulterleibchen
- Sitzhose
- Abduktionskeil
- Schalenträger mit Wechseladapter

			
<p>Die abklappbaren Seitenführungen erleichtern Ein- und Ausstieg</p>	<p>Lasche für den Kfz- Dreipunktgurt</p>	<p>Dreieckkeil</p>	<p>Fußbank</p>

3. Einbau

Hinweis:

Bei Erhalt Ihres Autosicherheitssitzes Tony Plus wurde dieser von Ihrem Fachhändler auf die Bedürfnisse Ihres Kindes und den Vorgaben Ihres Autos korrekt angepasst und eingestellt.

3.1 Grundausrüstung

Der Sicherheitssitz Tony Plus kann in Abhängigkeit der gewählten Position der Führungslasche für den Autosicherheitsgurt auf dem rechten bzw. linken Sitzplatz der hinteren Sitzbank Ihres Fahrzeuges postiert werden.

4. Einstellungen

4.1 Einstellung der Länge des Schrittgurtes und Einstellung der Höhe des Brustpolsters

Die Höhe des Brustpolsters wird mit dem Einstellen der Länge des Schrittgurtes geändert. Seien Sie dabei vorsichtig, um ein Einklemmen des Halses des Kindes zu verhindern.



Einstellen der Länge des Schrittgurtes unter dem Brustpolster: Drücken Sie den gelben Knopf und ziehen an dem Gurt mit dem gelben Schildchen, um die Länge des Gurtes zu verkürzen
Um nicht zu viele Gurte sichtbar zu haben, führen Sie das Gurtende in den grauen Gurtbezug

Um den Gurt länger zu machen, drücken Sie den gelben Knopf und ziehen das Brustschild mit dem Schrittgurt nach oben. Um nicht zu viele Gurte sichtbar zu haben, führen Sie das Gurtende in den grauen Gurtbezug

4.1 Einstellung der Sitzneigung



Durch den Sitzkeil kann die Tony Plus–Autositzschale in eine für Ihr Kind angenehme Stellung gebracht werden. Standardmäßig wird durch den Sitzkeil ein angenehmer Sitzwinkel von 15° vorgegeben. Auf Wunsch können natürlich auch andere Keilgrößen geliefert werden, um den speziellen Bedürfnissen Ihres Kindes gerecht zu werden. Durch die Klettverbindungen zwischen dem Keil und der Sitzunterfläche wird das Verrutschen des Keils ausgeschlossen.

4.2 Einstellung der Kopffixierung

Um eine sichere und angenehme Sitzhaltung Ihres Kindes zu gewährleisten, ist eine Fixierung des Kopfes sehr wichtig. Durch eine Klettverbindungen ist eine schnelle, stufenlose Anpassung möglich. Sie können zum Einen mit dem markierten Riemen eine vertikale Verstellung vornehmen und zum Anderen die Kopffixierung selbst in der Horizontalebene verschieben.

5. Gebrauch

Überprüfen Sie den Tony Plus, nachdem Sie ihn an Ihrem Autositz angebracht und befestigt haben.

Durch das Betätigen des roten Knopfes auf dem Gurtschloss können Sie das Begurtungssystem öffnen. Beide Gurtzungen werden gleichzeitig frei gegeben. Achten Sie beim Schließen darauf, dass beide Gurtzungen wirklich eingerastet sind, bevor Sie die Fahrt beginnen.

Der Freigabeknopf (s. Bild) der handbetätigten Gurteinstellung erlaubt eine Verstellung der Gurtlänge mit einem Griff:

- (1) Losschnallen: Drücken Sie den roten Freigabeknopf der handbetätigten Gurteinstellung, die in den Sitz hineinführt. Dadurch werden die Schultergurte freigegeben, so dass sie herausgezogen werden können.
- (2) Festschnallen: Verkürzen Sie die Schultergurte des Tony Plus, indem Sie den Gurt, der vorne am Sitz befestigt ist, herausziehen, bis die Schultergurte straff anliegen.



(1) Drücken Sie den roten Freigabeknopfes, um die Schultergurte herauszuziehen.

(2) Ziehen des Gurtes an der handbetätigten Gurteinstellung zur Verkürzung der Schultergurte.

2. Der Dreipunktgurt im Fahrzeug ist unbedingt notwendig, um den TONY PLUS anzubringen und dem Benutzer die größtmögliche Sicherheit zu geben.

Nachdem Sie das Kind mit dem Fünfpunktgurt des TONY PLUS positioniert haben, ziehen Sie den Dreipunktgurt des Kfz heraus und stecken dessen Schlosszunge in das Gurtschloss.

Dabei führen Sie den Beckengurt des Kfz-Dreipunktgurtes durch beide Gurtführungen des Sitzbereichs und straffen diese im unteren Bereich. Danach führen Sie den Schultergurt des

Dreipunktgurtes auf der Seite des Schlosses durch die Gurtführung des Sitzbereiches und legen ihn auf der anderen Seite in die Gurtführung des Schulterbereiches ein. Danach straffen Sie den Gurt im Schulterbereich.

Wenn Sie den TONY PLUS mit dem Dreipunktgurt auf dem Sitz gesichert haben, überzeugen Sie sich, dass der Hals und das Gesicht des Kindes nicht von dem Gurt gestört werden. Achten Sie darauf, dass das Gurtschloss des Autosicherheitsgurtes unterhalb der Gurtführung im Sitzbereich liegt. Nur dadurch ist die richtige Lasteinleitung in die Gurtführung gewährleistet. Sollte das Gurtschloss des Autosicherheitsgurtes oberhalb der Gurtführung liegen, sprechen Sie bitte Ihren Fachhändler an.

Der Dreipunktgurt muss vor Beginn der Fahrt gespannt werden und straff am Benutzer anliegen. Außerdem darf der Gurt nicht verdreht sein. Das Brustschild des Fünfpunktgurtes muss so eingestellt sein, dass der Beckengurt so tief wie möglich eingestellt ist, damit das Becken richtig gehalten wird, das Gurtschloss aber nicht unter dem Gurt des Kfz liegt.

Wenn Sie im Zweifel sind, ob Sie den TONY PLUS und das Kind richtig positioniert haben, sprechen Sie Ihren Fachhändler an.

Wenn Sie den Schultergurt Ihres Autosicherheitsgurtes durch die Gurtführungslasche des TONY PLUS leiten, vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsgurt unterhalb des Halses des Kindes und seiner Schulter verläuft.

Führen Sie dann den Beckengurt ihres Autosicherheitsgurtes durch die TONY PLUS Gurtführung im Sitzbereich. Vergessen Sie dabei nicht, sicher zu stellen, dass der Sitzgurt den gesamten Körper des Kindes fixiert, ohne verdreht zu sein.

3. Lehnen Sie den Rücksitz nicht zu weit zurück. Eine zu starke Rückenlage könnte den Sicherheitsgurt in seiner Wirkung reduzieren und gefährlich machen.
4. Der TONY PLUS alleine gewährleistet nicht die Sicherheit Ihres Kindes im Falle einer Kollision. Der TONY PLUS ist ein zusätzlicher Sitz, entwickelt für behinderte Kinder, die Schwierigkeiten haben, im Auto zu sitzen. Es ist für Kinder gefährlich, eine liegende Position im Auto einzunehmen, da der Sicherheitsgurt dann verminderte Wirkung zeigt. Vergessen Sie nicht, den Sicherheitsgurt ihres Autos anzulegen, nachdem Sie die Gurte und Polster des TONY PLUS angebracht haben.
5. Bei einigen PKW/Kombis, Vans, Kleinbussen und Transportbussen für Behinderte, die eingesetzt werden für den Transfer zu den Kindergärten, Sonderschulen und Werkstätten,

besteht das Problem, dass die Sicherheitsgurte für o.a. Kinder-Autosicherheitssitz-Systeme nicht zur Anwendung kommen können. Dies ist immer der Fall, wenn der Übergang vom Sitzpolster zum Rückenpolster geschlossen ist und keine Gurte durchgeführt werden können.

Zusatzgurte für die Rückbanksicherung:

Der Zusatzgurt für die Rückbanksicherung wird waagrecht zur Sitzfläche um die Rückenlehne des PKW gespannt.

Die versteifte, geschlossene Vorderplatte liegt auf der Rückenlehne auf. Die Unterkante der Vorderplatte befindet sich ca. 10-20 cm über der Sitzfläche.

Die Enden des Zusatzgurtes werden um die Rückenlehne geführt und die oberen und unteren Gurtenden werden mittels der Pressverschlüsse miteinander verbunden. Zuletzt sind die geschlossenen Gurte noch einmal maximal zu spannen.

Nun sind die Sicherungsgurte des Kinder-Autositzsystems zwischen Rückenpolster des PKW-Sitzes und der versteiften Vorderplatte des Zusatzgurtes durchzuführen und nach oben um die Kopfstütze/Kopfstützenholme zu legen und über die Verschlüsse am Autositz zu sichern (siehe Beschreibung des betreffenden Autositzes).

!Nachspannen nicht vergessen!

!Überprüfen Sie noch einmal, ob die Gurtverbindungen fest arretiert sind!

!Die Verwendung des PKW-3-Punkt-Sicherheitsgurtes ist wie in der betreffenden Gebrauchsanweisung weiterhin unbedingt erforderlich!

Hinweis:

Achten Sie darauf, dass der Gurt nicht verdreht ist und der Beckengurt richtig in den Vertiefungen des Tony Plus-Sitzes liegt.

6. Reinigung des Tony Plus

Zum Reinigen können Sie die Bezüge abnehmen. Sie sollten sie bei 30°C immer auf „Links“ waschen. Auf Scheuermittel, Aceton oder Spiritus sollten Sie verzichten.

Für alle weiteren Servicearbeiten wenden Sie sich bitte an Ihr Sanitätsfachgeschäft oder an die Firma RehaNorm.

7. Fachhändler-Bestätigung

Der liefernde Fachhändler bestätigt, dass der für

(Name des Kunden)

(Anschrift)

gelieferte Kinderschalenstuhl Tony Plus gemäß den individuellen Bedürfnissen ausgestattet und körpergerecht eingestellt ist und somit eine sichere, stabile Sitzposition und ein korrekter Sitz des 3-Punkt-Gurtes gewährleistet ist.

Die Kunden wurden sorgfältig in den Gebrauch und die Benutzung des Hilfsmittels eingewiesen.

(Datum/Ort)

(Unterschrift, Stempel)

8. Gewährleistung

Die gesetzliche Gewährleistungszeit beträgt zwei Jahre nach Auslieferung an den Benutzer.

Hinweis: Der Gewährleistungsschein wird nicht ersetzt. Bewahren Sie ihn deshalb gut auf.

Gewährleistungsschein		
Modell: Autosicherheitssitz Tony Plus		
Kunde Vorname, Name		

Straße und Hausnummer		

PLZ/ Wohnort		

Tel.		

Datum des Erwerbs		

Fachhändler		

Hersteller: RehaNorm GmbH & Co. KG, Ockenheimer Graben 50, 55411 Bingen		
+49 6721 9060	info@rehanorm.de	www.rehanorm.de