

# Mangar SURFER BATHER

## Badewannenlifter mit pneumatischer Hebefunktion

Baden soll Spaß machen. Doch der Spaß kann auf der Strecke bleiben, wenn das Baden mühevoll ist. Dies gilt speziell für Kinder mit Behinderungen und die Eltern oder Betreuer, die sie baden. – Darum ist der Surfer Bather entwickelt worden.

### Rückenschonend

Im Vordergrund stehen die Sicherheit des Kindes und die Entlastung des Rückens der pflegenden Person; dies sind meist die Mütter oder die Pflegerinnen. Ohne belastendes Bücken kann das Kind auf der Liege platziert werden. Es wird in die richtige Position gebracht und dann mit einem separaten Bedienungsgerät so weit abgesenkt, wie es erwünscht ist. Nach dem Baden genügt ein Knopfdruck, und der Lifter fährt das Kind wieder bis zum Wannenrand hoch.

### Positionierung

Für die richtige Positionierung des Kindes auf der Liege kann die Rückenlehne in drei Stufen von circa 10 Grad auf 55 Grad variiert werden. Dabei schützt ein Sitzpolster vor Verrutschen des Kindes. Neben dem Standardkopfpolster steht ein hufeisenförmiges Polster zur Auswahl für Kinder mit schwach ausgeprägter Kopfkontrolle. Gurte für den Brust- und den Beinbereich stehen zur Verfügung, ebenso ein Abduktionskeil.

### Daten:

- Maximales Benutzergewicht: 50 kg
- Maximale Benutzergröße: 160 cm
- Gesamtlänge: 117 cm
- Gesamtbreite: 41 – 68,5 cm
- Höhe: 5,5 – 43 cm
- Rückenlehnenneigung: ca. 10°- 55°
- Gewicht der Liege: 4,2 kg
- Gewicht des Hubsystems: 5,5 kg
- Gewicht des separaten Akkukompressors: 6 kg



### Einfache Handhabung

Über eine kleine, wasserdichte Handsteuerung kann exakt die gewünschte Höhe in der Wanne eingestellt werden. Dabei kann die Liegefläche bis auf knapp sechs Zentimeter auf den Wannenboden abgesenkt werden, so dass ein geringer Wasserverbrauch entsteht. Durch das geringe Gewicht von 9,7 Kilogramm kann der Surfer Bather leicht in die Wanne eingesetzt und wieder herausgenommen werden. Wird der Lifter nicht gebraucht, kann er neben der Wanne aufgehängt oder mit all seinem Zubehör in einer speziellen Tragetasche verstaut werden.

### Grundausstattung:

- Mangar Surfer Bather mit Batteriekompressor
- Vierfach verstellbare Rückenlehne
- Kopfpolster
- Brustgurt
- Handsteuerung

### Sicher und hygienisch

Der TÜV-geprüfte Surfer Bather arbeitet mit Luftpolstern, die von einem Akkukompressor aufgeblasen werden. So ist keine starke Stromquelle in der Nähe der Wanne nötig. Abdeckkappen links und rechts von der Liege reduzieren Verletzungsfahrten auf ein Minimum. Der Netzbezug und die glatten Kunststoffflächen sind leicht zu reinigen.

Durch all diese Vorzüge nimmt der Surfer Bather der Badesituation jede Anspannung und ermöglicht das, was Baden auch erzeugen soll: Spaß.

### Zubehör:

- Beingurt, vertikal und horizontal einstellbar, mit Befestigungsschienen
- AD-Keil
- Kopfpolster, hufeisenförmig
- Klappsicherung
- Tragetasche
- Klemmer zur Vertikalstellung der Seitenklappen
- Rückenverlängerung 28 cm, einsteckbar
- Beinlagerungspolster, keilförmig in drei Größen oder nach Maß