

Multiroller

Buggy, Jogger, Offroader und vieles mehr

Hilfsmittelnummer: 18.99.01.1045

Der Multiroller ist für Kinder mit leichten, mittleren aber auch schweren Behinderungen gedacht. Dies können cerebrally bedingte Bewegungsstörungen sein, Muskelschwächen oder sonstige Handicaps.

Leicht zu heben

Er ist in seiner Grundausstattung mit eingehängtem Sitz nur circa neun Kilo leicht. **Vorteil:** Häufig sind es Frauen, die den Multiroller schieben, ins Auto heben oder ins Haus tragen müssen. Das geringe Gewicht erleichtert diese Arbeit.

Leicht zu bewegen

Der Multiroller ist als ein Hochtechnologieprodukt mit einem pffiffigen Faltmechanismus konzipiert worden. Ziel der Entwicklung waren vor allem Leichtigkeit, Stabilität und deutsche Qualität. Der Rahmen ist wegen seiner speziellen Aluminiumlegierung besonders hart und starr. Dadurch wird die kinetische Energie in hohem Maße in die Vorwärtsbewegung umgesetzt und nicht durch Verwindungen und Schlingerbewegungen aufgezehrt. **Vorteil:** Auch hier gilt, dass es meist Frauen sind, die das größer und schwerer werdende Kind auch über unebene Strecken transportieren wollen. Und dann ist ein leichtes Rollverhalten ein Stück zusätzliche Freiheit.

Universell einsetzbar

Der Multiroller kann als leichte Zweitversorgung lediglich aus dem Rahmen und einem eingehängten Sitz bestehen. Mit der verstellbaren Rückenlehnung ist er um ein paar Grade anspruchsvoller. Zahlreiches Zubehör zur Positionierung und Fixierung des Kindes machen ihn auch bei schwierigeren Krankheitsbildern geeignet. Seinen besonderen Charme entwickelt der Multiroller dadurch, dass er mit anderen Sitzsystemen kombiniert werden kann:



Buggyversion mit eingehängtem Sitz



- individuellen Sitzschalen,
- Therapiesitzen anderer Hersteller,
- vielen Autositzen der verschiedensten Marken und speziell RehaNorm (Carrot 3, Tony Plus).

Vorteil: Von den zahlreichen Vorteilen sei hier nur das Beispiel erwähnt: Für die Urlaubsreise kann ein Multiroller und ein Carrot 3 Autositz genügen, um den Transport des Kindes zu gewährleisten.

Platz sparend

Als Buggy, Jogger oder Offroader kann der Multiroller gut gefaltet werden und braucht wenig Stauraum; speziell dann, wenn die Hinter- und ggf. die Fronträder entfernt werden.

Gutes Design

Bei dieser Vielzahl von oben genannten Vorteilen ist es kein Nachteil, wenn das Produkt auch noch gut aussieht.

Fazit

Er ist ein Buggy, er ist ein Jogger, er ist ein Offroader, er ist ein Fahrradanhänger und noch vieles mehr. Er wächst mit und kann bis zu 75 kg tragen.

Farbe

Silbermetall

Zubehör

Für Lösung 1: Einhängesitz

- Eingehängter Sitz aus Abstandsgewirke blau oder schwarz
- Sitzverlängerung von 30 auf 35 cm
- Rückenverlängerung um 15 cm
- Kopfstütze klettbar
- Fußbank 1 am Rahmen befestigt

Für Lösung 2: Fester Sitz

- Sitzrahmen, bei dem Sitz und Rücken winkelverstellbar sind, Sitztiefe 30 bis 35cm verstellbar, Bezug: Abstandsgewirke blau oder schwarz
- Rückenverlängerung um 15 cm
- Kopfstütze klettbar
- Fußbank 2 unter dem Sitz befestigt

Für Lösung 3: Sitzschale

- Platte zur Montage von Sitzschalenadaptern

Für Lösung 4: Therapiesitz

- Adapter für unterschiedliche Therapiesitze (auf Anfrage)

Für Lösung 5: Autositz

- Adapter für Autositz Carrot
- Adapter für Autositz Tony Plus
- Adapter für sonstige Autositze (auf Anfrage)

Sonstiges Zubehör

- Zusätzliches Buggy Set
- Zusätzliches Jogger Set
- Zusätzliches Offroad Set
- Fahrradanhänger (Jogger Set erforderlich)
- Einlegepolster für kleine Kinder
- Rumpfpelotten mit Rückenplatte
- Abduktionskeil mit Grundplatte
- Sitzkeil nach Maß

- Brustschultergurt
- Vierpunkt- und Fünfpunktgurte
- Zweipunkt- und Vierpunktbeckengurte
- Sitzhose
- Fußriemen (Paar)
- Sonnenschutz oder Sonnenverdeck
- Regenverdeck
- Beinschutzdecke mit Tasche 20x20 cm
- Tasche unten

Technische Daten	Schmaler Rahmen (Maße in cm)		Breiter Rahmen (Maße in cm)	
	Gr. 1 Antriebsräder 16"	Gr. 2 Antriebsräder 20"	Gr. 3 Antriebsräder 16"	Gr. 4 Antriebsräder 20"
Höhe gesamt (A)	102	107	102	107
Breite gesamt (B)	68	68	73	73
Länge gesamt:				
- Buggy	116 bis 135	116 bis 135	116 bis 135	116 bis 135
- Jogger	136 bis 151	155 bis 170	136 bis 151	155 bis 170
- Offroad	128 bis 143	120 bis 135	128 bis 143	120 bis 135
Minimaler Wendekreis:				
- Buggy	122	122	132	132
- Jogger	142	142	152	152
- Offroad	134	134	154	154
Höhe Schiebegriff	86 bis 116	86 bis 120	86 bis 116	86 bis 120
Fußbank 1 B x L	38 x 23	38 x 23	43 x 26	43 x 26
Faltmaße H x B x L	34 x 56 x 84	34 x 56 x 84	30 x 63 x 88	30 x 63 x 88
Maximales Benutzergewicht	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Gewicht mit Einhängesitz ab	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg
Einhängesitz				
- Rückenhöhe	58	58	58	58
- Sitztiefe	33	33	33	33
- Sitzbreite	30 – 38 (vorne)	30 – 38 (vorne)	35 – 43 (vorne)	35 – 43 (vorne)
- Rückenbreite	30 – 40 (oben)	30 – 40 (oben)	30 – 45 (oben)	30 – 45 (oben)
Fester Sitz				
- Rückenhöhe	62	62		
- Sitztiefe	30 - 35	30 - 35		
- Sitzbreite	38	38		
- Rückenbreite	38	38		
- Rückenverstellung in Grad	185° bis 225°	185° bis 225°		
- Sitzverstellung in Grad	95° bis 135°	95° bis 135°		
- Unterschenklänge	20 – 30	20 – 30		
- Fußbank 2 B x L	30 x 20	30 x 20		
- Fußbank 2 Verstellbarkeit in Grad	90° - 30°	90° - 30°		

- Personen mit eingeschränktem Sehvermögen können dieses Prospekt auf der Internetseite www.rehanorm.de aufrufen und in vergrößerten Lettern ausdrucken oder sollten sich dieses ggf. vorlesen lassen.
- Wartungsanweisungen, Hinweise zur Reinigung und weitere technische Spezifikationen sind Inhalt der Gebrauchsanweisung, welche auf der Internetseite www.rehanorm.de verfügbar ist.
- Beim Transport in einem Fahrzeug darf das Kind nicht im Buggy, sondern muss in einem Autosicherheitsitz sitzen. Stellen Sie auch sicher, dass der Multiroller sicher im Fahrzeug verstaut wird.

Zwei Rahmen – drei Front-Sets per Knopfdruck



Rahmen des Offroaders
Rahmen mit vier nicht lenkenden 16" Rädern für Wald und Feld und Sand und Strand

Rahmen des Buggy
Rahmen mit zwei 16" Hinterrädern, zwei 10" Fronträdern für den Einsatz im Haus oder auf ebenem Boden.

Rahmen des Joggers
Rahmen mit einem nicht lenkenden 12"-Frontrad für sportliche Zwecke wie Skaten oder Joggen. Mit einer Fahrradbindung wird er zu einem Fahrradanhänger (s. Zubehör).



Wie oben, aber 5 cm höher (Größe 2)

Wie oben, aber 5 cm breiter (Größe 3)

Wie oben, aber 5 cm höher und 5 cm breiter (Größe 4)

Kombinationsfähig ...



Mit Jogger-Set und Fahrradbindung



Beliebige Sitzschalenadapter

... mit vielen Sitzen



Mit Einhängesitz, Fußbank 1 und Buggy Set



Mit festem Sitz, Fußbank 2 und Offroad Set



Mit Sitzschale, Fußbank 2 und Buggy Set



Mit Autositz Carrot 3-Fußbank und Jogger Set



Mit Autositz Tony Plus, Fußbank 2 und Buggy Set



Auch mit Korsett



Fester Sitz ...



... in vielen Positionen



Falten kann man auch den ganzen Multiroller

... mit viel Zubehör



Beispiel: Sonnenverdeck



Beispiel: Tasche



Beispiel: Kopfstütze