

MANGAR

SURFER BATHER

Gebrauchsanweisung





Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Produkts durch. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch kann es zu Schäden und/oder schweren Verletzungen kommen.



Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf

WARNHINWEISE (Gefahr einer möglichen Verletzung oder von anderen schweren Nebenwirkungen)

- Der Kinder-Badewannenlift wurde für die Verwendung in herkömmlichen Badewannen konzipiert. Einige Eck- und Massagebadewannen, die mit Düsen zahlreiche Wasserstrahlen erzeugen, eignen sich nicht für den Kinder-Badewannenlift, weil die Saugnäpfe des Geräts in solchen Badewannen nicht richtig an der Badewannenoberfläche anhaften. Sollte der Kinder-Badewannenlift in einem anderen als dem üblichen Bad genutzt werden, überprüfen Sie die Eignung für den Gebrauch und dass die Saugnäpfe richtig haften.
- Vergewissern Sie sich immer, dass die Sperrhebel verriegelt sind, bevor Sie den Kinder-Badewannenlift in die Badewanne setzen.
- Stellen Sie sicher, dass jegliche Öl- und Seifenreste vom Kinder-Badewannenlift und aus der Badewanne entfernt sind. Achten Sie dabei besonders auf die Saugnäpfe und den Badewannenboden. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass die Saugnäpfe fest an der Badewanne haften. Die Saugnäpfe haften möglicherweise nicht auf der Oberfläche von Badewannen, die mit einer erneuten Emailleschicht überzogen wurden oder von Badewannen mit gewellten oder strukturierten Oberflächen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Saugnäpfe nicht an der Badewanne haften.
- Achten Sie darauf, dass Arme und Beine des Kindes sich vollständig innerhalb der Plattform befinden, bevor Sie den Kinder-Badewannenlift anheben oder absenken.
- Lassen Sie NIE ein Kind unbeaufsichtigt auf dem Kinder-Badewannenlift.
- Das Kinder-Badewannenlift sollte nur als Badehilfe dienen. Es darf KEINESFALLS außerhalb der Badewanne verwendet werden. Verwenden Sie das Kinder-Badewannenlift NIE als Hilfe zum Ein-/Aussteigen in die/aus der Badewanne. Verwenden Sie es NIE als Tritt, Ständer oder als Vorrichtung zum Heben von Gegenständen.
- Verwenden Sie das Kinder-Badewannenlift nie als Stütze für besseren Halt beim Reinigen der Badewanne oder beim Herausholen von Gegenständen aus der Badewanne, da das Kinder-Badewannenlift dabei ungleichmäßig belastet werden kann und instabil wird.
- Das Badekissen sollte nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck verwendet werden. Es darf in keinsten Weise modifiziert werden.
- Das Ladegerät EIGNET SICH NICHT für eine Verwendung in der Gegenwart von entflammenden, narkotisierenden Mischungen mit Luft, Sauerstoff oder Stickstoffdioxid.
- Wenn der Airflo-Kompressor verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Leitung zur Handsteuerung und der Luftschlauch so angeordnet sind, dass keine Gefahr eines Umkippen oder einer Strangulation besteht.

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Kinder-Badewannenlift oder dem Airflo spielen, da die unkontrollierte und unbeaufsichtigte Anwendung des Geräts zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.
- Um Verletzungen während des Gebrauchs und/oder Schäden an den Geräten zu vermeiden, halten Sie Tiere vom Kinder-Badewannenlift und vom Airflo-Kompressor fern.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass es keine offensichtlichen Anzeichen für Schäden oder lockere Saugnäpfe gibt. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Kinder-Badewannenlift nicht, sondern bitten Sie Ihren Fachhändler um Unterstützung.
- Entfernen Sie alle Antirutschmatten aus dem Bereich, in dem die Saugnäpfe positioniert werden sollen.
- Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, laden Sie den Akku NIE im Badezimmer, im Freien oder in einer feuchten Umgebung auf.
- Verwenden Sie keine andere Luftzufuhr zum Aufblasen des Kinder-Badewannenlift.

VORSICHTSHINWEISE (Probleme, wie Fehlfunktionen, Geräteausfall, Schäden am Gerät oder andere Sachschäden, sind möglich)

- Laden Sie den Akku nur mit dem Mangar-Akkuladegerät, welches im Lieferumfang des Airflo-Kompressors enthalten ist.
- Trennen Sie den Airflo-Kompressor vor dem Transport vom Kinder-Badewannenlift, um ein versehentliches Aufblasen des Kissens zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine erdnussölhaltigen Badezusätze, da dies die Saugnäpfe beschädigen kann. Wurden derartige Zusätze dennoch verwendet, waschen und spülen Sie die Saugnäpfe nach dem Gebrauch gründlich, um Rückstände zu entfernen.


Weitere Unterstützung oder Informationen erhalten Sie bei unserem Kundendienst unter der Rufnummer +44(0)1544 267674 oder per E-Mail unter enquiries@winn-care.uk

Safety Information	2
Warnhinweise	2
Vorsichtshinweise	3
Produktbeschreibung	5
Verwendungszweck	5
Standard-Lieferumfang	5
Anbringung und Verwendung	6
Rückenlehne und Plattformaufgabe befestigen/einstellen	6
Kinder-Badewannenlift in der badewanne installieren	7
Kinder-Badewannenlift anheben und absenken	7
Wartung und Pflege	8
Kinder-Badewannenlift aus der badewanne entfernen	8
Regelmässige reinigung	8
Desinfektion	8
Wartung	8
Netzgewebe nach dem waschen am rückenlehnenrahmen befestigen	9
Transport/Lagerung	9
Entsorgung/Recycling	9
Liste der bauteile	10
Zur pflege Ihres Kinder-Badewannenlift	10
Fehlerbehebung	11
Technische daten	11
Anhänge	12
Verwendete symbole	12
Garantie	12
Konformitätszeugnis (Certificate of Conformity)	13

Verwendungszweck

Der Mangar Kinder-Badewannenlift ist eine mit Druckluft betriebene, in der Höhe verstellbare Badeplattform, die als Badehilfe für Kinder entworfen wurde. Der Kinder-Badewannenlift eignet sich insbesondere für Kinder, deren Oberkörper nur eine begrenzte Stabilität besitzt. Die verstellbare Rückenlehne stützt den Körper vollständig ab, bei Bedarf auch zusammen mit den Haltegurten.

Die Spannungsversorgung erfolgt über den vom Mangar Airflo 12-Akku gespeisten Kompressor.

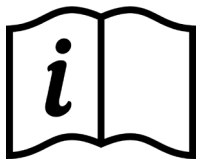

LESEN SIE SICH BITTE vor dem Gebrauch des Kinder-Badewannenlift die separate Bedienungsanleitung zum Airflo 12-Kompressor durch.




Standard-Lieferumfang

- 1 x Kinder-Badewannenlift-Plattform (A).
- 1 x Scherenlift (einschließlich Luftkissen und Bodenplatte) (B).
- 1 x Rückenlehne (einschließlich Kopfstützenpolster) (C).
- 1 x Plattform mit Seitenschiene (D).
- 2 x Haltegurt (E).
- 1 x Bedienungsanleitung.
- 1 x Airflo 12-Kompressor (mit Bedienungsanleitung).

Extraausstattung

- U-Kopfstütze (nicht dargestellt).
- Trennkeil (F).
- Duschlageklemmen (nicht dargestellt).




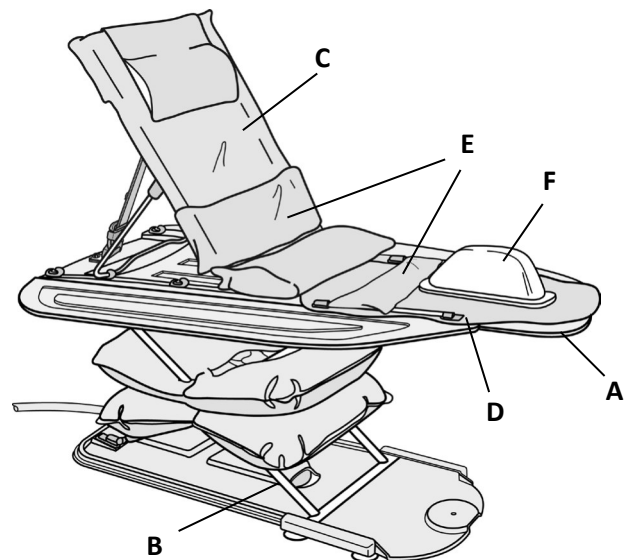




Rückenlehne und Plattformauflage befestigen/einstellen

- Die Rückenlehne und die Plattformauflage werden mit Kunststoffzapfen an der Plattform befestigt, die in Schlüsselloch-förmige Schlitzte geführt werden. Führen Sie den Zapfen wie gezeigt in den entsprechenden Schlitz (**1** und **2** in Abb. 1) und drücken Sie dann die Verriegelungsnase nach unten, bis sie hörbar einrastet (**3** in Abb. 1).
- Befestigen Sie die Rückenlehnscharniere in den Schlitzten (**A** in Abb. 2).
- Stellen Sie den Neigungswinkel der Rückenlehne ein, indem Sie die Rückenlehnenstütze in eine der drei Rasten (**B** in Abb. 1) drücken. Sie können die Rückenlehne auch ganz flach stellen, indem Sie die Rückenlehnenstütze aus der jeweiligen Raste ziehen und die Rückenlehne dann flach liegen lassen.
- Richten Sie den Winkel der Rückenlehne in die erforderliche Position und verbinden Sie die Schnalle mit dem Rückhalteriem (C Abb 3). Ziehen sie den Riemen an, um den Winkel der Rückenlehne zu arretieren. Wenn der Winkel der Rückenlehne geändert werden muss, öffnen Sie die Schnalle, bevor Sie den Winkel neu einstellen. Verbinden Sie die Schnalle wieder und straffen Sie den Riemen, um die Rückenlehne in ihrem neuen Winkel zu arretieren.
- Befestigen Sie die Plattformauflage (**D** in Abb. 1), indem Sie die Kunststoffzapfen gleichzeitig in die Schlitzte (**E** und **F** in Abb. 2) einführen.



Wenn Sie die Rückenlehne und die Plattformauflage entfernen möchten, können Sie die Kunststoffzapfen auf folgende Weise lösen:-

- Drücken Sie die Verriegelungsnase auf der Unterseite der Plattform nach oben (**1** in Abb. 4).
- Drücken Sie den Zapfen nach oben aus dem Schlitz (**2** und **3** in Abb. 4).

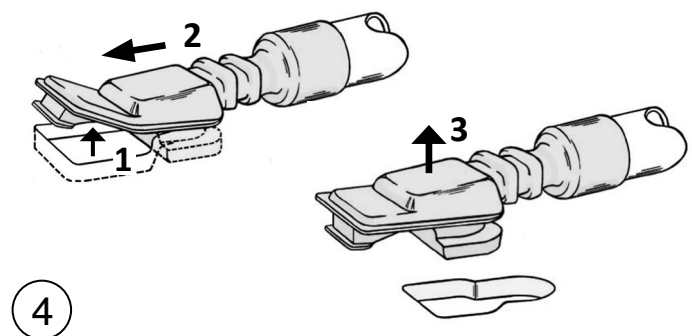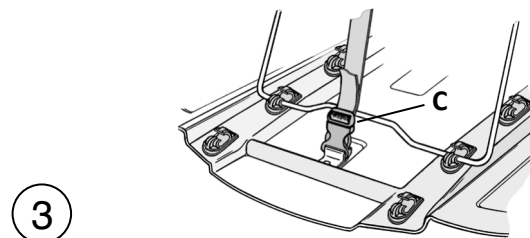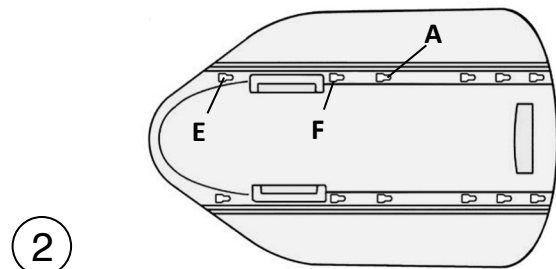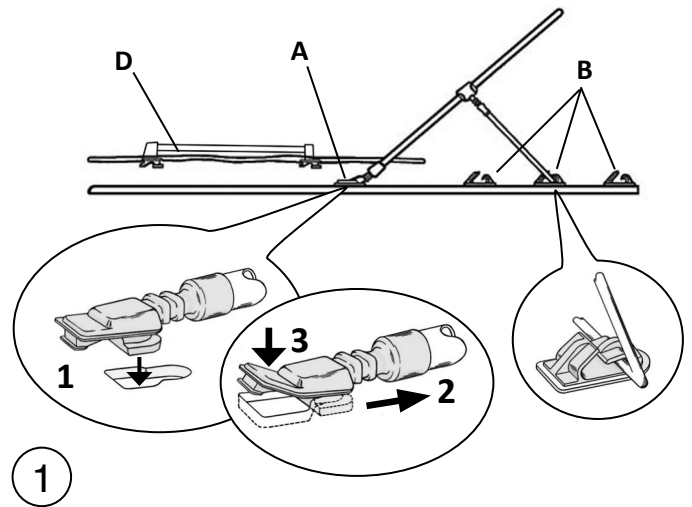


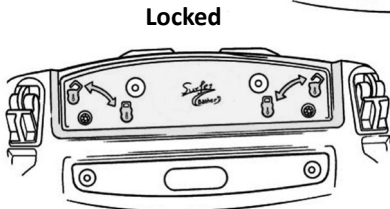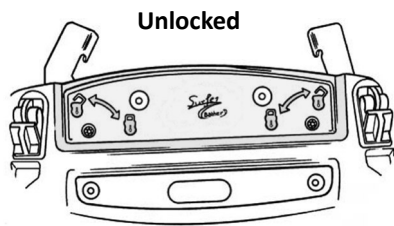

5

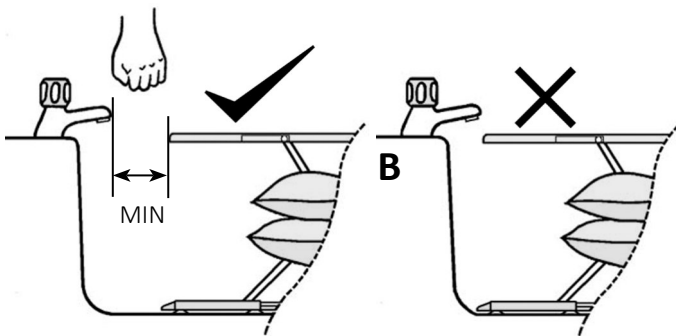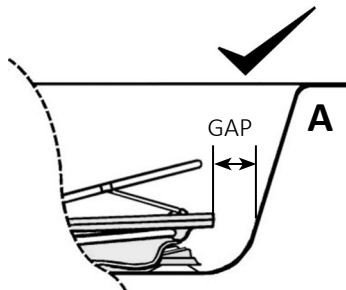

6

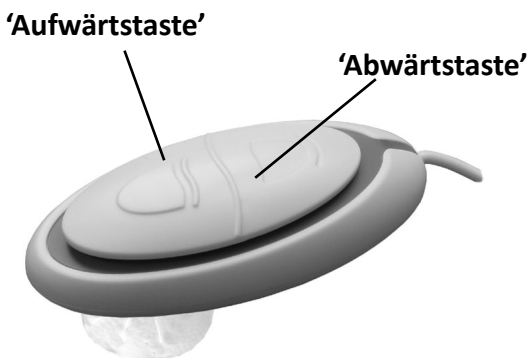

7

HINWEIS: Die Klappflügel der Plattform können nach längerer Lagerzeit etwas steif werden. Sie können in diesem Fall Abhilfe schaffen, indem Sie jeden Klappflügel vollständig öffnen und dann wieder schließen. Wiederholen Sie dieses Öffnen und Schließen so häufig wie nötig, bis jeder Klappflügel sich leicht bewegen lässt.

Kinder-Badewannenlift in der Badewanne installieren

VORSICHT! Vergewissern Sie sich immer, dass die Sperrhebel verriegelt sind, bevor Sie den Kinder-Badewannenlift in die Badewanne setzen (Abb. 5).

- Stellen Sie den luftleeren, nicht aufgeblasenen Kinder-Badewannenlift so in eine leere Badewanne, dass sich das hintere Ende der Bodenplatte möglichst nah an dem den Wasserhähnen gegenüberliegenden Ende der Badewanne befindet, ohne dass die Bodenplatte auf der Badenwannekrümmung aufliegt (**A** in Abb. 6). **Drücken Sie den Kinder-Badewannenlift dann fest nach unten, damit die Saugnäpfe der Bodenplatte sicher an der Badenwanneoberfläche anhaften.**
- Blasen Sie die Luftkissen ganz auf und überzeugen Sie sich, dass zwischen dem schmalen Ende der Plattform und den über den Badewannenrand vorstehenden Wasserhähnen ein ausreichender Abstand vorhanden ist (**B** in Abb. 6).

VORSICHT! Vergewissern Sie sich vor der Verwendung immer, dass alle Saugnäpfe richtig positioniert sind und fest an der Badewanne anhaften.

Kinder-Badewannenlift anheben und absenken


VORSICHT! - Achten Sie darauf, dass Arme und Beine des Kindes sich vollständig innerhalb der Plattform befinden, bevor Sie den Kinder-Badewannenlift anheben oder absenken.

Lassen Sie NIE ein Kind unbeaufsichtigt auf dem Kinder-Badewannenlift.

- Um den Kinder-Badewannenlift anzuheben, drücken Sie auf der Airflo-Handbedienung die "Aufwärtstaste" (Abb. 7).
- Um den Kinder-Badewannenlift an einer beliebigen Stelle anzuhalten, lassen Sie die "Aufwärtstaste" einfach los.
- Um den Kinder-Badewannenlift abzusenken, drücken Sie auf der Airflo-Handbedienung die "Abwärtstaste". **Achtung:** Wenn die Kinder-Badewannenlift Plattform, nachdem sie den Boden des Bades erreicht hat, wieder aufsteigt, drücken Sie den "runter" Knopf noch einmal und halten Sie ihn gedrückt, bis die verbliebene Luft aus dem Blasebalg entwichen ist.

Kinder-Badewannenlift aus der Badewanne entfernen


- Lassen Sie das Wasser aus der Badewanne ab.
- Um das Herausnehmen aus der Badewanne zu erleichtern, sollte die Plattform vom Scherenlift getrennt werden. Heben Sie den Kinder-Badewannenlift etwas an und ziehen Sie die Sperrhebel nach außen (Abb. 5), um die Plattform vom Scherenlift zu entriegeln. Rasten Sie die Plattform aus dem Scherenlift aus (**1** in Abb. 8). Drehen Sie die Plattform wie gezeigt (**2** in Abb. 8), um die Stangen aus den Schlitzen auf der Unterseite der Plattform zu lösen.

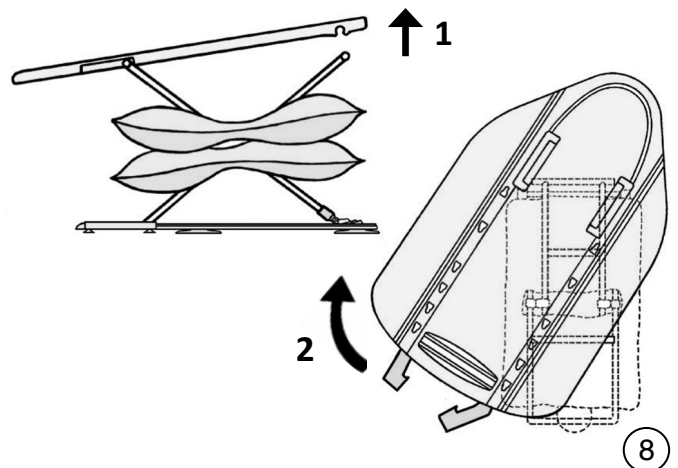

HINWEIS: Die Sperrhebel müssen entriegelt werden, bevor Sie die Plattform vom Scherenlift trennen können.

- Heben Sie den Rand von jedem der beiden großen Saugnäpfe an der Bodenplatte an, um die Haftung an der Badewanne aufzuheben (**A** in Abb. 9) und den Scherenlift aus der Badewanne zu entfernen.
- Die vier kleinen Saugnäpfe an der Bodenplatte lösen sich allein von der Badewannenoberfläche, wenn Sie den Scherenlift aus der Badewanne heben (**B** in Abb.9).

HINWEIS: Versuchen Sie keinesfalls, den Kinder-Badewannenlift aus der Badewanne zu entfernen, bevor Sie die Saugwirkung der beiden großen Saugnäpfe an der Bodenplatte aufgehoben haben, weil der Kinder-Badewannenlift ansonsten beschädigt wird.

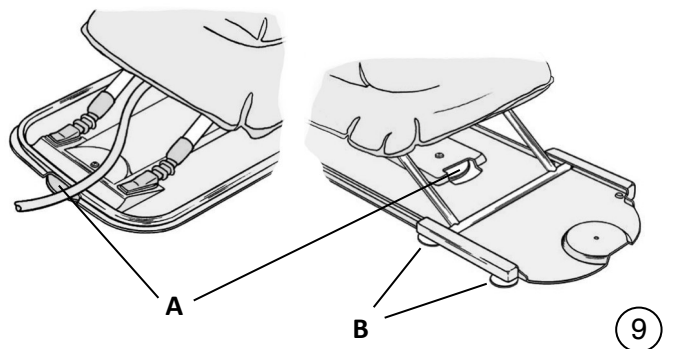

Regelmässige reinigung

Nach dem Gebrauch blasen Sie die Luftkissen ganz auf und spülen sie mit sauberem Wasser ab, um Seifenreste und Schmutz zu entfernen. Sie können den Kinder-Badewannenlift mit einem geeigneten Flüssigreinigungsmittel oder Desinfektionsmittel reinigen und anschließend trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. **Trocknen Sie keinesfalls mit Heiß- oder Warmluft.** Entfernen Sie die Schaumstoffeinsätze und waschen Sie das Rückenlehnengeflecht und die Gurte gemäß den Pflegehinweisen auf dem Schild. Die Schaumstoffeinsätze sollten von Hand in warmem Wasser mit Reinigungsmittel gewaschen und in sauberem Wasser gründlich abgespült werden, um alle Seifenrückstände zu entfernen. Drücken Sie den Schaumstoff vorsichtig aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Lassen Sie ihn dann an der Luft trocknen.


Das Plattformpolster darf nur in warmem Wasser und unter Verwendung eines milden Reinigungsmittels von Hand gewaschen, unter sauberem Wasser gründlich abgespült und dann an der Luft getrocknet werden (die Oberfläche des Polsters kann abgewischt werden, um überschüssiges Wasser zu entfernen- nicht wringen oder in den Trockner geben). **Verwenden Sie zum Trocknen keine Heißluft.**

Desinfektion

Reinigen Sie vor der Desinfektion alle Bauteile des Kinder-Badewannenlift (bei voll aufgeblasenen Luftkissen), indem Sie sie mit einem geeigneten Reinigungsmittel und Wasser waschen. Anschließend können Sie den Kinder-Badewannenlift mit einem Desinfektionsmittel desinfizieren. Spülen Sie nach der Desinfektion gründlich mit Wasser. **Trocknen Sie keinesfalls mit Heiß- oder Warmluft.**

Wartung

WinnCare empfiehlt, das Kinder-Badewannenlift jährlich entweder von einem Fachhändler oder einer anderen adäquat qualifizierten Person überprüfen zu lassen.

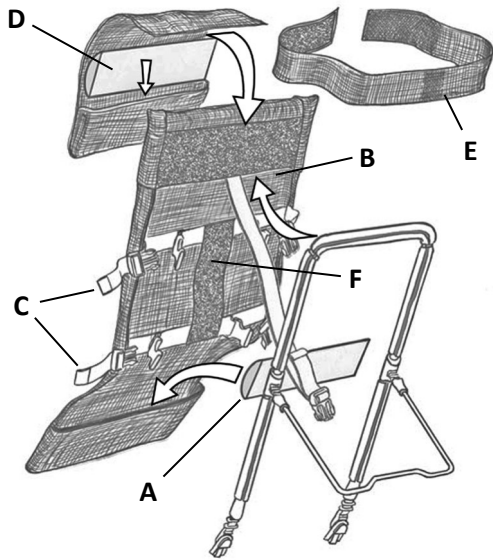

10

Netzgewebe nach dem Waschen am Rückenlehnenrahmen befestigen

- Stecken Sie den Oberschenkelstützschaum (**A** in Abb. 10) in die untere Tasche des Netzgewebes.
- Führen Sie den Rückenlehnenrahmen in die Tasche (**B**) des Netzgewebes und schließen Sie die vier Schnallen (**C**).
- Lockern Sie die Schnallenriemen oder ziehen Sie diese fester, um die Spannung des Netzgewebes auf dem Rückenlehnenrahmen zu verändern.
- Stecken Sie das Kopfstützenpolster (**D**) in die Tasche der Kopfauflage und befestigen Sie die Kopfstütze gegebenenfalls mit dem Klettband an der Rückenlehne.
- Den Haltegurt (**E**) können Sie nach Bedarf am Klettbandstreifen (**F**) befestigen.

Transport/Lagerung

Trennen Sie den Airflo-Kompressor vor dem Transport vom Kinder-Badewannenlift, um ein versehentliches Aufblasen des Kissens zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass das Kinder-Badewannenlif vor der Lagerung sauber ist und gründlich gereinigt wurde. Wurde das Kinder-Badewannenlif vor der Lagerung nicht gründlich abgetrocknet oder trocknen gelassen, kann sich Schimmel auf der Produktoberfläche bilden. Dadurch wird das Gewebe geschwächt und die Produktgarantie verfällt. Lagern Sie das Kinder-Badewannenlif in einer trockenen Umgebung.

Laden Sie den Airflo-Akku zur Wartung bei einer längerfristigen Lagerung alle 3 Monate auf.


Entsorgung/Recycling

Wenn das Kinder-Badewannenlif das Ende seiner Nutzdauer erreicht hat, entsorgen Sie es bei Ihrer örtlichen Haushaltsabfall-Recyclingstation (Wertstoffhof).

Wenn der Airflo das Ende seiner Nutzdauer erreicht hat, entnehmen Sie die Akkus, um diese dann sicher und gemäß den kommunalen Richtlinien zu entsorgen. Entsorgen Sie den Airflo bei Ihrer örtlichen Haushaltsabfall-Recyclingstation (Wertstoffhof).

Liste der Bauteile


1. Plattform
2. Plattformsperrehebel
3. Scherenlifteinheit
4. Luftkissen
5. Luftschlauch
6. Luftkissenschnalle
7. Große Saugnäpfe
8. Kleine Saugnäpfe
9. Rückenleheneinheit
10. Rückhalteriemens
11. Rückenlehenscharnier
12. Rückenlehnenraste
13. Plattformauflage
14. Sicherheitsventil
15. Bodenplatte

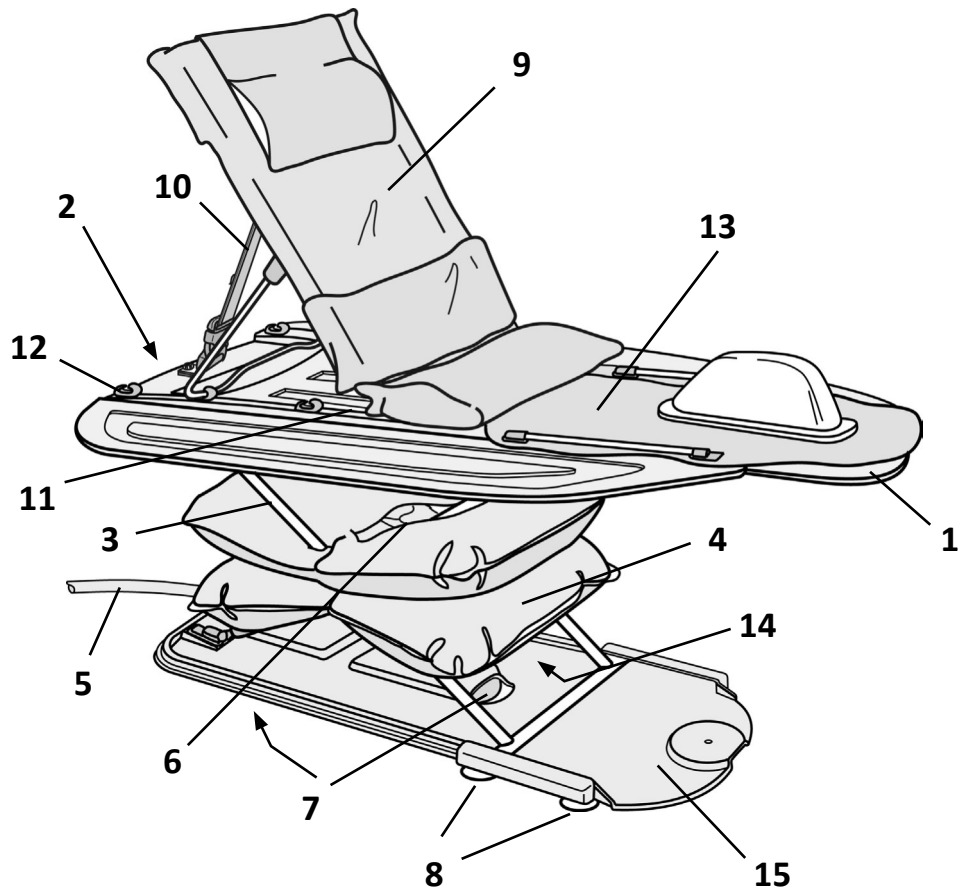

Zur Pflege Ihres Kinder-Badewannenlift prüfen Sie regelmäßig, ob:

- Die Luftkissenschnalle (6) korrekt befestigt ist und die Luftkissen (4) unbeschädigt sind.
- Die Plattformsperrehebel (2) betriebssicher und unbeschädigt sind.
- Der Luftschlauch (5) unbeschädigt ist.
- Beide großen Saugnäpfe (7) betriebssicher und unbeschädigt sind.
- Die vier kleinen Saugnäpfe (8) betriebssicher und unbeschädigt sind.
- Das Sicherheitsventil (14) einwandfrei arbeitet und Luft ablässt, wenn die Luftkissen bis über den zulässigen Druck aufgeblasen werden.
- Die Rückenlehenscharniere (11) und Rückenlehnenrasten (12) unbeschädigt sind und sicher in den jeweiligen Schlitz sitzen.
- Der Kinder-Badewannenlift und alle Zubehörteile sauber sind.

Fehlerbehebung	
Problem	Abhilfemaßnahme
<ul style="list-style-type: none"> Falls der Kinder-Badewannenlift nicht aufgeblasen werden kann oder nicht in der gewünschten Höhe stehen bleibt, prüfen Sie, ob 	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch des Kinder-Badewannenlift am Airflo angeschlossen ist. Der Luftschlauch weder geknickt noch blockiert ist. Das Sicherheitsventil einwandfrei arbeitet.
<ul style="list-style-type: none"> Der Kompressor läuft nicht, wenn "Up" (Heben) an der Handsteuerung betätigt wird. 	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch des Kinder-Badewannenlift am Airflo angeschlossen ist.
<ul style="list-style-type: none"> Der Kompressor stoppt bei dem Versuch, das Badekissen aufzublasen, ständig. 	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch nicht abgeknickt ist.
<ul style="list-style-type: none"> Kontrollleuchte Die Akkuladestands blinkt "Rot/Grün". 	<ul style="list-style-type: none"> Dies geschieht, wenn die Stromüberlast-Abschaltung ausgelöst hat. Lassen Sie das Gerät 3 Sekunden lang unbetätigt, damit es sich selbst zurücksetzen kann.
<ul style="list-style-type: none"> Die Akkuladestands-Kontrollleuchte blinkt "Rot". 	<ul style="list-style-type: none"> Dies geschieht, wenn die interne Temperaturabschaltung ausgelöst hat. Lassen Sie den Airflo 60-90 Minuten lang abkühlen.

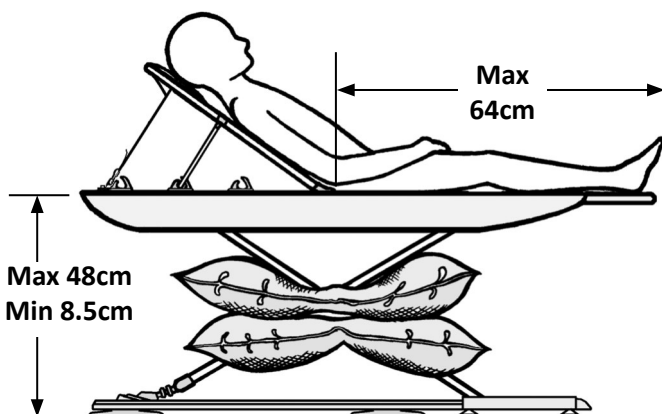

Technische daten

Maximales Gewicht des Benutzers:	50kg
Maximal empf. Größe des Benutzers:	135cm
Plattformhöhe (min. bis max.):	8.5 cm – 48 cm
Rückenlehnenneigung:	flach bis max 80°
Gewicht (Plattform):	4.2 kg
Gewicht (Scherenlift):	5.5 kg
Gesamtgewicht:	9.7 kg
Maximaler Luftdruck:	0.35 bar

In der Bedienungsanleitung und am Badekissen verwendete Symbole



Warnung: Lesen Sie sich vor Gebrauch die Bedienungsanleitung durch



Die Taste "Aufwärtstaste" (Heben)



Die Taste "Abwärtstaste" (Senken)



Gerät vom Typ BF (Schutz vor elektrischem Schlag)

Garantie

Die Garantie gilt für Material- und Fabrikationsfehler und schließt das Gerät, Ersatzteile und Arbeitsstunden mit ein. Von der Garantie ausgeschlossen sind gebrauchsbedingte normale Abnutzung, mutwillige Beschädigung, allgemeine Fahrlässigkeit, unsachgemäßer Gebrauch sowie Modifizierungen oder Reparaturen durch nicht qualifizierte Personen.

Die folgenden Bestimmungen schränken das Verbraucherrecht nicht ein. Dieses Produkt wird unter dem Einverständnis verkauft, dass ein Material- oder Fabrikationsfehler, der innerhalb des Garantiezeitraums auftritt, kostenlos behoben wird, vorausgesetzt:

- (a) es liegt ein akzeptabler Beleg (z. B. Rechnung, Lieferschein) vor, dass das Anspruch wird innerhalb der Garantie Periode gemacht.
- (b) der Fehler ist nicht auf Unfallschäden (durch Transport oder anderweitig entstanden), unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparaturen zurückzuführen.

Kinder-Badewannenlift-Seriennummer:

.....

Kaufdatum:

.....

Rechnungs-/Lieferschein-Nr:

.....

WinnCare behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen und/oder jegliche Informationen in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung zu ändern

Declaration of Conformity

Mangar International as manufacturer hereby declares that the following products conform to the:

- Applicable provisions of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017
- UK Medical Devices Regulations 2002

and following standards:

BS EN 60601-1-6:2010 and A1:2015.

BS EN 60601-1:2006 and A12:2014.


BS EN 60601-1-11:2015.

BS EN 62366-1:2015.

Trade name: Airflo 12 with Surfer Bather
Basic UDI-DI: 5020833MPCA040500PB
Product Classification: ISO 9999:2016, 12 36 18 Assistive products for lifting persons
Classification: MDR Class 1

18.09.2020

Place and Date



Simon Claridge, CEO



WIN CARE

WinnCare is a trading name of Mangar International Ltd.

Mangar International Ltd, Presteigne, Powys,
Wales, LD8 2UF

United Kingdom

Tel: +44 (0)1544 267674

Fax: +44 (0)1544 260287

enquiries@winnCare.uk

mangarhealth.com



WINNCARE France
4, Le Pas du Château -
85670 Saint-Paul-Mont-
Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64
www.winnCare.fr

EC REP