



## Gebrauchsanweisung

Die Sitzhilfe für Kinder  
**Dreiecksitz Multiflex**



**Lieber Kunde,**

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Therapiesitz Multiflex von RehaNorm!

Er soll Ihnen zukünftig den Alltag vereinfachen und Ihrem Kind neue Möglichkeiten beim Spielen, Waschen und in der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eröffnen. Ihr Kind soll darin sicher sitzen können. Deshalb bitten wir Sie unbedingt die folgende Gebrauchsanweisung durchzulesen, bevor Sie den Sitz verwenden.

Bei Fragen steht Ihnen unser Team jederzeit gerne unter (06721) 906 0 oder mit einem Videocall zur Verfügung. Wir freuen uns über jede Anregung Ihrerseits zur Verbesserung dieses Produkts per Mail an [info@rehanorm.de](mailto:info@rehanorm.de).

**Viele glückliche Zeiten mit Ihrem Multiflex,**

Ihre  
Andrea Staus und das RehaNorm-Team

**Konformitätserklärung:**

*Hersteller*

**RehaNorm GmbH & Co. KG**  
Am Ockenheimer Graben 50  
55411 Bingen

**Produktbezeichnung:**

Dreiecksitz Multiflex

**Produktkennzeichnung:**

Die Produktkennzeichnung für dieses Produkt befindet sich unter dem Sitz.

**Erklärung:**

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Patienten oder Anwender bestimmt, für den die Person, die das betreffende Produkt verordnet hat und die aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation durch nationale Rechtsvorschriften dazu befugt ist, die Verordnung ausgestellt hat.

Die betreffenden Informationen zu Patient oder Anwender bzw. zum Verordner sind bei uns als Hersteller des Produktes einsehbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen des Anhanges I der Verordnung (EU) 2017/745 des europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017.

<b>Wichtige Hinweise zuerst</b>	04
<b>Die Bodengrundplatte</b>	05
<b>Der Multiflex als Badehilfe</b>	06
<b>Fixierungshilfen</b>	07
Abduktionskeil	07
Becken- und Brustgurt	08
Bezug	09
<b>Wartung und Pflege</b>	09
<b>Technische Daten und Gewährleistung</b>	10

## Ihr Dreiecksitz Multiflex und seine Bestandteile



## Wofür ist der Multiflex geeignet?

Der Dreiecksitz Multiflex gibt Kindern mit verminderter Körperkontrolle sicheren Halt beim Sitzen, speziell im Badezimmer. Vier Saugnäpfe verhindern ein Rutschen des Sitzes z.B. in der Duschtasse.

Die Seitenführung, die Gurte und der Abduktionskeil stützen rundum.

Außerhalb des Feuchtbereichs steht der Multiflex mit seinen Saugnäpfen auf einer separaten Acrylplatte. Bezüge (Zubehör) machen das Sitzen noch komfortabler. Benutzt werden kann er zum Beispiel zum Spielen auf dem Boden oder im Sandkasten, sowie im Sitzkreis im Kindergarten.

## Wann und wo ist der Multiflex nicht geeignet:

Der Multiflex eignet sich nur bedingt für Kinder mit Streckspasmus, weil bei einer Attacke die Saugnäpfe dem Druck nicht standhalten könnten.

**Allgemein - gilt: Lassen Sie das Kind nie alleine, wenn es im Multiflex sitzt.**



**Achtung:** Der Multiflex ist nicht dazu geeignet ein Kind auf einen Stuhl, ein Sofa oder eine weitere Höhe zu setzen, da der Sitz hier nicht befestigt ist, und das Kind fallen könnte und sich schwere Verletzungen zuziehen würde.



## 05 Die Bodengrundplatte

Bei der Lieferung steht der Multiflex mit seinen Saugnäpfen auf einer Bodenplatte aus Acryl. In dieser Form kann er als Sitzhilfe innerhalb der Wohnung eingesetzt werden. Wenn er allerdings in der Badewanne oder der Dusche verwendet werden soll, muss er von dieser Bodenplatte entfernt werden.

Dazu fassen Sie mit beiden Händen gleichzeitig zwischen die Grundplatte und den Dreiecksitz. Die vier Saugnäpfe sind in diesem Zwischenraum jeweils paarweise miteinander verbunden. An jedem Saugnapf befindet sich eine kleine Lasche, die zum einfacheren Lösen gedacht ist. Zum Lösen der Saugnäpfe müssen Sie nun auf beiden Seiten des Sitzes diese Gummiverbindung auseinander ziehen.

Um den Sitz später wieder zu fixieren, stellen Sie den Multiflex mit seinen vier Saugnäpfen wieder auf die Grundplatte auf (am besten richten Sie die kleinen Laschen an den Saugnäpfen nach aussen, dann ist das erneute Lösen einfacher) und üben einen leichten Druck auf die Sitzfläche aus, damit sich die Saugnäpfe wieder festziehen.



**Achtung:** Achten Sie darauf, dass die Grundplatte beim Lösen der Saugnäpfe sicher steht und nicht herunterfallen kann, sobald der Sitz gelöst ist.



## 06 Der Multiflex als Badehilfe

Um den Multiflex in der Badewanne oder der Dusche zu nutzen, lösen Sie ihn immer von der Bodengrundplatte. (siehe Abschnitt „Bodengrundplatte“)

Drehen Sie als erstes die kleinen Laschen an den Saugnäpfen nach aussen, damit Sie sie nach dem Baden einfacher lösen können. Achten Sie beim Einsetzen des Multiflex in die Badewanne darauf, dass alle vier Saugnäpfe Kontakt zum Wannensboden haben.

Fixieren Sie den Dreiecksitz in der Badewanne, indem Sie leichten Druck auf die Sitzfläche des Multiflex ausüben. Dadurch saugen sich die Saugnäpfe des Sitzes am Wannensboden fest. Nur so ist gewährleistet, dass der Multiflex sicher steht und nicht wackelt oder gar kippt.



Zum Lösen des Sitzes, greifen Sie unter den Sitz und ziehen Sie mithilfe der kleinen Laschen an den Saugnäpfen die Gummiverbindungen der Saugnäpfe auseinander, bis sich der Sitz vom Untergrund löst.

Nach der Benutzung sollten die vier Saugnäpfe gereinigt werden und der Sitz wieder auf der Grundplatte angebracht werden, um die Saugnäpfe zu schonen.



Als ergänzende Fixierungshilfen für ein sicheres und bequemes Sitzen sind verschiedene Zubehörteile für den Multiflex erhältlich:

- **Abduktionskeil**
- **Becken- und Brustgurt**
- **Bezug**

### **Abduktionskeil**

Der Abduktionskeil kann je nach Sitztiefe des Kindes in verschiedene Positionen gebracht werden. Dazu lösen Sie auf der Unterseite des Sitzes die Rändelmuttern und ziehen Sie den Abduktionskeil nach oben vom Sitz ab. Stecken Sie ihn zur Befestigung durch eines der drei vorgegebenen Löcher in den Sitz ein und drehen die Rändelmutter auf der Unterseite wieder fest zu, damit der Abduktionskeil sich nicht lösen kann.

## **Becken- und Brustgurt**

Beide Gurte dienen dazu, das Kind – wenn nötig – beim Sitzen zu sichern und zu unterstützen. Zur Befestigung des Gurtes im Beckenbereich wird der Gurt durch die unteren Schlitze im Rückenteil des Sitzes geführt; für die Befestigung des Gurt im Brustbereich nutzt man die oberen Schlitze.

Beide Gurte werden durch eine Stecker-Schloss-Verbindung geschlossen. Sie können die Gurte öffnen, indem Sie mit der einen Hand die Arretierung des Steckers von oben und unten zusammendrücken und mit der anderen Hand den Stecker aus dem Schloss ziehen.

Wenn Sie die Gurte schließen möchten, stecken Sie den Stecker in das Schloss, bis Sie ein Klick-Geräusch hören. Das Schloss lässt sich nun durch einfaches Ziehen nicht mehr aus dem Stecker lösen.

Die Länge der Gurte können Sie ändern, indem Sie den Gurt nach oben durch den Gurthalter führen, die Länge anpassen und auf der anderen Seite nach unten wieder herausziehen.

## **Neoprenpolsterbezug**

Zum Vermeiden von Druckstellen oder für mehr Komfort kann der Multiflex mit einem Polsterbezug aus Neopren (im Folgenden: Bezug) ausgestattet werden.

Sie befestigen den Bezug auf dem Sitz, indem Sie zunächst den Reißverschluss auf der Rückseite des Bezuges öffnen. Danach ziehen Sie den Bezug über den Sitz. Die beiden Gummibänder verlaufen dabei unter dem Sitz um die beiden hinteren Saugnäpfe herum und werden an der Rückseite des Multiflex miteinander verknotet. Zuletzt schließen Sie den Reißverschluss auf der Rückseite des Sitzes.

Zum Abnehmen des Bezuges lösen Sie den Knoten der Gummibänder, öffnen Sie den Reißverschluss und ziehen Sie den Bezug vom Multiflex ab.

Wollen Sie gleichzeitig einen Abduktionskeil und einen Neoprenpolsterbezug benutzen, müssen Sie den Abduktionskeil vor dem Anbringen oder Entfernen des Bezuges abnehmen (siehe Abschnitt „Abduktionskeil“)

Der Multiflex kann ohne weiteres mit haushaltsüblichen Reinigern gereinigt werden. Dabei sollten Sie jedoch darauf achten, keine bleichenden oder ätzenden Reiniger zu verwenden, da diese die Saugnäpfe des Sitzes angreifen können.

Die vier Saugnäpfe des Dreiecksitzes sollten nach jeder Benutzung in der Badewanne oder Dusche gereinigt werden, damit die Saugnäpfe voll funktionstüchtig bleiben und ein sicherer Stand des Sitzes gegeben ist.

Die Bezüge bei max. 30° mit Feinwaschmittel in der Waschmaschine waschen.

Nicht für Trockner geeignet. Gefahr der Beschädigung.



### **Gewährleistung:**

Die Gewährleistung für dieses Produkt beträgt 24 Monate ab dem Kauf. Bitte bewahren Sie die Verkaufsunterlagen mit Datum auf.

Um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, setzen Sie sich mit ihrem Fachhändler in Verbindung, der alle weiteren notwendigen Maßnahmen für Sie einleiten wird.

### **Einschränkungen der Gewährleistung**

Diese Gewährleistung beinhaltet nicht Schäden, die durch Nachlässigkeit entstanden sind oder durch falsche Behandlung, weil diese Gebrauchsanweisung nicht beachtet worden ist.



### **Technische Daten**

**Sitzbreite:** ca. 30 cm

**Sitztiefe:** ca. 23 cm

**Rückenhöhe:** 34 cm

**Gewicht:** ca. 4 kg

**RehaNorm GmbH & Co. KG**

Am Ockenheimer Graben 50  
55411 Bingen  
Telefon (06721) 906 0  
Telefax (06721) 906 66

**Stand: 2023**