

Gebrauchsanweisung

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie die TONY PLUS benutzen.

TONY PLUS

Autosicherheitsitz



Ausgabe 10/2025

Lieber Kunde,

an dieser Stelle möchten wir Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und den Erwerb unseren Autosicherheitssitzes **TONY PLUS** danken. Bevor Sie allerdings den **TONY PLUS** benutzen, sollten Sie erst einmal aufmerksam die Gebrauchsanweisung durchlesen und unsere Hinweise beachten. So werden Sie den **TONY PLUS** optimal nutzen und dem Benutzer höchste Sicherheit bieten können.

Bei der Montage kann Ihnen Ihr Fachhändler helfen.

Wichtige Information!

Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanweisung bei dem Produkt verbleibt.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Team jederzeit gerne unter (06721) 906 0 oder mit einem Videoanruf zur Verfügung. Wir freuen uns über jede Anregung Ihrerseits zur Verbesserung dieses Produkts per Mail an info@rehanorm.de.

Gute Fahrt mit Ihren TONY PLUS,

Ihre

Andrea Staus und das RehaNorm-Team

Konformitätserklärung

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Patienten oder Anwender bestimmt, für den die Person, die das betreffende Produkt verordnet hat und die aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation durch nationale Rechtsvorschriften dazu befugt ist, die Verordnung ausgestellt hat.

Die betreffenden Informationen zum Patienten oder Anwender bzw. zum Verordner sind bei uns als Hersteller des Produktes einsehbar.

Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen des Anhanges I der Verordnung (EU) 2017/745 des europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017.

Produktbezeichnung: Autosicherheitssitz **TONY PLUS**

Produktkennzeichnung: befindet sich auf der Rückseite unter dem Bezug.

Hersteller:

RehaNorm GmbH & Co. KG,
Am Ockenheimer Graben 50,
55411 Bingen
Deutschland
Telefon +49 6721 906 0
Telefax +49 6721 906 66,
E-Mail: info@rehanorm.de,

Inhaltsverzeichnis

Konformitätserklärung	2
Inhaltsverzeichnis	3
Warn- und Sicherheitshinweise	4
Was Sie beachten sollten, bevor Sie die TONY PLUS nutzen.....	4
Produktbeschreibung	5
Grundausrüstung	5
Zubehör	5
Einbau	6
Einstellungen und Anpassungen	6
Einstellung der Schrittgurtlänge und Brustpolsterhöhe	6
Einstellung der Sitzneigung.....	6
Einstellung der Kopfstütze.....	7
Gebrauch.....	7
Anbringung und Sicherung des TONY PLUS im Fahrzeug	8
Zusatzgurte für die Rückbanksicherung.....	9
Zusammenfassung wichtiger Hinweise.....	9
Pflege und Instandhaltung	10
Pflege	10
Instandhaltung.....	10
Sicheres Entsorgen	10
Fachhändler-Bestätigung	11
Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen	11
Gewährleistung	12
Gewährleistungsdauer	12
Einschränkungen der Gewährleistung.....	12
Formular für Gewährleistungsansprüche	12

Warn- und Sicherheitshinweise



Achtung, ernsthafte und sogar tödliche Verletzungen können auftreten, wenn die folgenden Hinweise nicht beachtet werden!

Angaben im Sinne der Dritten Verordnung über straßenverkehrsrechtliche Vorschriften vom 05. Juni 1990:

Der **TONY PLUS** ist verwendbar als Rückhaltesystem mit folgenden Bestimmungen:

- Nach vorne gerichtete Rückhaltevorrückung für Kinder und Erwachsene
- Nicht integriert
- Typ des Gurtes: Dreipunkt-Sicherheitsgurt (für Erwachsene)
- Sonstige Ausführungen: Kompletter Sitz
- Fabrik- und Handelsmarke **TONY PLUS**
- Herstellerbezeichnung der Rückhalteeinrichtung für Kinder **TONY PLUS**

Was Sie beachten sollten, bevor Sie die TONY PLUS nutzen

Der Kinderschalenstuhl **TONY PLUS** darf **nur mit dem 3-Punkt-Gurt** Ihres Fahrzeugs verwendet werden.

Achten Sie darauf, dass alle Gurte straff angelegt und nicht verdreht sind. Gebrauchen Sie keinen Sicherheitsgurt, der beschädigt ist, z.B. durch Zigarettenglut angeschmort ist.

Wurde der Autosicherheitsstuhl **TONY PLUS** bei einem Unfall stark belastet, darf der Stuhl nicht weiterverwendet werden.

Der Stuhl darf keinen Temperaturen über 50 °C ausgesetzt werden (z. B. im Sommerfahrzeug, in der Nähe offener Flammen oder in der Sauna).

Veränderungen oder Umbauten am Autosicherheitsstuhl **TONY PLUS** ohne Genehmigung der zuständigen Behörde sind unzulässig und können die Sicherheit gefährden. Ein Umbau des Produkts geschieht in Ihrer Verantwortung. Wir sind nicht für Schäden verantwortlich, die in Folge eines nicht korrekten Umbaus auftreten.

Eine mangelhaft angebrachte Autosicherheitsstuhl **TONY PLUS** kann zu einem hohen Todes- oder Verletzungsrisiko führen.

Verwenden Sie den Autosicherheitsstuhl **TONY PLUS** nicht, wenn sie auf dem Beifahrersitz befestigt ist und Sie dann an der Betätigung der Gangschaltung oder an der Handbremse behindert.

Sichern Sie Ihr Gepäck so, dass es Sie und die Insassen, im Falle eines Unfalls, nicht verletzt.

Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt im Auto.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf. Bei Verlust der Gebrauchsanweisung kann jederzeit eine aktuelle Version unter www.rehanorm.de heruntergeladen werden.

Produktbeschreibung

Der Autosicherheitssitz **TONY PLUS** ist ein spezieller Rückhaltesitz für den sicheren Transport von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit körperlichen Einschränkungen im Fahrzeug. Er bietet durch seine individuelle Anpassbarkeit eine stabile, ergonomische und sichere Sitzposition.

Maximale Belastung: 120 kg

Eine körpergerechte Einstellung in Verbindung mit dem individuell erforderlichen Zubehör sorgt für eine stabile und korrekte Sitzposition und optimalen Halt.

Der **Dreipunkt-Sicherheitsgurt** Ihres Fahrzeugs gewährleistet die erforderliche Rückhaltesicherheit.

Grundausrüstung

Der Lieferumfang des **TONY PLUS** umfasst:

- Autosicherheitssitz **TONY PLUS** inkl. Bezug
- Feste Pelotten (Paar)
- Sicherungsgurte hinten (Paar)
- Klippanverschlüsse (hinten)

Hinweis:



Der Autosicherheitssitz **TONY PLUS** darf **nur in Verbindung mit dem Dreipunkt-Sicherheitsgurt** des Fahrzeugs verwendet werden.

Zubehör

Die nachstehend aufgeführten Zubehörausstattungen dienen der optimalen Anpassung des **TONY PLUS** an die individuellen Anforderungen Ihres Kindes und tragen zur Erhöhung der Sicherheit bei:

- Abklappbare Rumpfpelotten rechts und/oder links
- Abklappbare Oberschenkelführung rechts und/oder links
- Unterlegkeil
- Führungslaschen (rechts/links)
- Höhenverstellbare Fußbank
- Alu- oder Schaumstoff-Kopfstütze
- Hinterhauptpolster
- Brustgurt
- Therapietischplatte
- Vierpunkt- oder Fünfpunktgurt
- Beckengurt mit Pressverschluss
- Lendenwirbel-Stützpelotte
- Sitzkeilkissen nach Maß
- Brustschulterleibchen
- Sitzhose
- Abduktionskeil
- Schalenträger mit Wechseladapter

Einbau

Wichtiger Hinweis:



Ihr Fachhändler hat den **TONY PLUS** bei Auslieferung bereits auf die individuellen Bedürfnisse des Benutzers und auf das Fahrzeug abgestimmt.

Der Autosicherheitssitz **TONY PLUS** kann in Abhängigkeit der gewählten Position der Gurtführungslasche für den Autosicherheitsgurt auf dem rechten bzw. linken Sitzplatz der hinteren Sitzbank Ihres Fahrzeuges postiert werden.

Einstellungen und Anpassungen

Einstellung der Schrittgurtlänge und Brustpolsterhöhe

Die Höhe des Brustpolsters wird durch die Einstellung der Länge des Schrittgurts angepasst. Achten Sie dabei sorgfältig darauf, dass der Hals des Kindes nicht eingeklemmt wird.



Drücken Sie den gelben Knopf und ziehen Sie am Gurt mit dem gelben Schildchen, um die Gurtlänge zu verkürzen. Damit keine überstehenden Gurte sichtbar sind, führen Sie das Gurtende in den grauen Gurtbezug ein.




Um den Gurt zu verlängern, drücken Sie den gelben Knopf und ziehen Sie das Brustschild mit dem Schrittgurt nach oben. Damit keine überstehenden Gurte sichtbar sind, führen Sie das Gurtende in den grauen Gurtbezug ein.

Einstellung der Sitzneigung

Mit dem Sitzkeil lässt sich die **TONY PLUS**-Autositzschale in eine für Ihr Kind angenehme Sitzposition bringen. Standardmäßig sorgt der Sitzkeil für einen komfortablen Sitzwinkel von 15°.

Auf Wunsch sind auch andere Keilgrößen erhältlich, um den individuellen Bedürfnissen Ihres Kindes gerecht zu werden.

Dank der Klettverbindungen zwischen Keil und Sitzunterfläche ist ein Verrutschen des Keils ausgeschlossen.

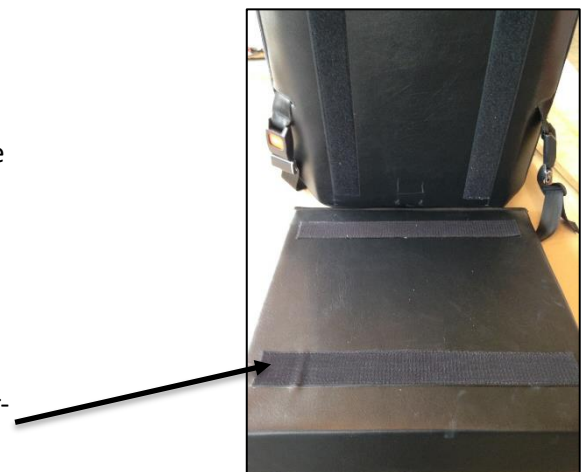

Einstellung der Kopfstütze

Um eine sichere und angenehme Sitzhaltung Ihres Kindes zu gewährleisten, ist eine Positionierung des Kopfes sehr wichtig. Die Höhe der Kopfstütze kann je nach Bedarf für den Benutzer eingestellt werden.

Einstellung der Kopfstütze

- Öffnen Sie den Bezug am Rücken.
- Schrauben Sie die selbstsichernden Muttern mit einem 8 mm-Steck- oder Maulschlüssel ab.
- Stellen Sie die richtige Höhe ein und schrauben Sie die die Muttern wieder fest.
- Schließen Sie den Bezug per Reißverschluss zu.




Gebrauch

Überprüfen Sie den **TONY PLUS**, nachdem Sie ihn auf dem Autositz angebracht und sicher befestigt haben.

Durch Drücken des roten Knopfes am Gurtschloss können Sie das Begurtungssystem öffnen. Beide Gurtzungen werden dabei gleichzeitig freigegeben. Achten Sie beim Schließen darauf, dass beide Gurtzungen korrekt einrasten, bevor Sie die Fahrt beginnen.

Der Freigabeknopf (siehe Abbildung) der handbetätigten Gurteinstellung ermöglicht eine einfache Anpassung der Gurtlänge:

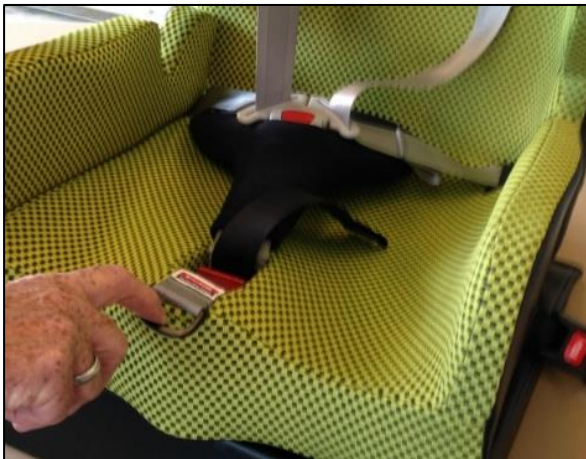

Losschnallen:

Drücken Sie den roten Freigabeknopf der handbetätigten Gurteinstellung, die in den Sitz hinein-führt. Dadurch werden die Schultergurte freigegeben und können herausgezogen werden.



Festschnallen:

Ziehen Sie den Gurt, der vorne am Sitz befestigt ist, heraus, um die Schultergurte des **TONY PLUS** zu verkürzen, bis diese straff und sicher anliegen.

Anbringung und Sicherung des **TONY PLUS** im Fahrzeug

Der Dreipunktgurt des Fahrzeugs ist zwingend erforderlich, um den **TONY PLUS** sicher zu befestigen und dem Benutzer größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Nachdem Sie Ihr Kind mit dem Fünfpunktgurt des **TONY PLUS** positioniert und gesichert haben, ziehen Sie den Dreipunktgurt des Fahrzeugs heraus und stecken die Schlosszunge in das Gurtschloss.

Führen Sie anschließend den Beckengurt des Fahrzeug-Dreipunktgurtes durch beide Gurtführungen im Sitzbereich und straffen Sie ihn im unteren Bereich.

Danach führen Sie den Schultergurt auf der Seite des Gurtschlusses durch die Gurtführung im Sitzbereich und auf der gegenüberliegenden Seite in die Gurtführung des Schulterbereichs. Straffen Sie den Gurt im Schulterbereich.

Prüfen Sie nach der Befestigung des **TONY PLUS** mit dem Dreipunktgurt, ob Hals und Gesicht des Kindes nicht vom Gurt berührt oder beeinträchtigt werden.

Achten Sie darauf, dass das Gurtschloss des Fahrzeuggurtes unterhalb der Gurtführung im Sitzbereich liegt. Nur so ist die korrekte Lasteinleitung in die Gurtführung gewährleistet.

Liegt das Gurtschloss oberhalb der Gurtführung, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Der Dreipunktgurt muss vor Fahrtbeginn straff angelegt und darf nicht verdreht sein.

Das Brustschild des Fünfpunktgurtes sollte so eingestellt werden, dass der Beckengurt möglichst tief liegt, um das Becken sicher zu halten. Das Gurtschloss darf dabei nicht unter dem Fahrzeuggurt liegen.

Wenn Sie unsicher sind, ob der **TONY PLUS** und das Kind korrekt positioniert sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

Achten Sie beim Einlegen des Schultergurts in die Gurtführungslasche des **TONY PLUS** darauf, dass der Gurt unterhalb des Halses und der Schulter des Kindes verläuft.

Führen Sie den Beckengurt Ihres Fahrzeuggurtes durch die Gurtführung im Sitzbereich des **TONY PLUS**. Stellen Sie sicher, dass der Gurt den Körper des Kindes straff und unverdreht fixiert.

Wichtige Hinweise:

- Lehnen Sie den Fahrzeugsitz nicht zu weit zurück. Eine zu starke Rückenlage kann die Wirkung des Sicherheitsgurtes beeinträchtigen und gefährlich sein.
- Der **TONY PLUS** allein gewährleistet keine vollständige Sicherheit bei einem Unfall. Er ist ein Zusatzsitz, entwickelt für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, die Schwierigkeiten haben, im Auto zu sitzen. Eine liegende Position im Fahrzeug ist gefährlich, da der Sicherheitsgurt dann seine Schutzwirkung verliert. Vergessen Sie nicht, den Fahrzeug-Sicherheitsgurt anzulegen, nachdem Sie die Gurte und Polster des **TONY PLUS** korrekt angebracht haben.
- In bestimmten Fahrzeugtypen (z. B. Kombis, Vans, Kleinbusse oder Transportfahrzeuge für den Kinder- oder Behindertentransport) kann es vorkommen, dass die Fahrzeugsicherheitsgurte nicht verwendet werden können. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Übergang zwischen Sitz- und Rückenpolster geschlossen ist und keine Durchführung der Gurte möglich ist.

Zusatzgurte für die Rückbanksicherung

Der Zusatzgurt für die Rückbanksicherung wird waagrecht zur Sitzfläche um die Rückenlehne des Fahrzeugs gespannt.

Die versteifte Vorderplatte liegt dabei auf der Rückenlehne auf; ihre Unterkante befindet sich etwa 10–20 cm über der Sitzfläche.

Führen Sie die Gurtenden um die Rückenlehne und verbinden Sie die oberen und unteren Gurtenden mit den Pressverschlüssen.

Spannen Sie anschließend alle Gurte maximal nach.

Führen Sie nun die Sicherungsgurte des Kinder-Autositzsystems zwischen dem Rückenpolster des Fahrzeugsitzes und der versteiften Vorderplatte des Zusatzgurtes hindurch.


Legen Sie die Gurte über die Kopfstütze bzw. Kopfstützenholme und sichern Sie sie über die Verschlüsse am Autositz (siehe Beschreibung des jeweiligen Autositzes).

Hinweis:


Achten Sie darauf, dass kein Gurt verdreht ist und der Beckengurt korrekt in den Vertiefungen des **TONY PLUS**-Sitzes liegt.


 **Nachspannen nicht vergessen!**


 **Überprüfen Sie, ob alle Gurtverbindungen fest arretiert sind!**

 **Die Verwendung des Fahrzeug-Dreipunkt-Sicherheitsgurtes ist gemäß der entsprechenden Gebrauchsanweisung weiterhin zwingend erforderlich!**


Zusammenfassung wichtiger Hinweise

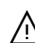 Verwenden Sie den **TONY PLUS** immer mit dem Dreipunkt-Sicherheitsgurt des Fahrzeugs.

 Überprüfen Sie regelmäßig alle Gurtverbindungen auf festen Sitz.

 Kein Transport in liegender Position.

 Alle Gurte müssen straff, korrekt geführt und unverdreht sein.

 Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Pflege und Instandhaltung

Pflege

Die verwendeten Stoffe sind nach DIN EN 1021 1 und 2 schwer entflammbar.

- Der Bezug ist abnehmbar und waschbar bei maximal 30 Grad.
- Benutzen Sie keinen Weichspüler
- Lassen Sie die Stoffteile nicht in der chemischen Reinigung waschen
- Bei Beschädigung sollte der Stoff ausgetauscht werden.
- Trocknen Sie die Teile auf einem Wäscheständer in einem gut durchlüfteten Raum
- Sind Körpersekrete in den Bezug eingedrungen, desinfizieren Sie diese Stellen großflächig mit einem haushaltsüblichen Desinfektionsmittel (z.B. Sagrotan oder Ähnliches).

Instandhaltung

Bitte führen Sie eine tägliche Sichtprüfung durch und kontrollieren regelmäßig den **TONY PLUS** auf fehlende Teile, lockere Schrauben und Fehlfunktionen. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt oder einer Fehlfunktion direkt an den ausliefernden Fachhändler.

Sicheres Entsorgen

Zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt, der Verhinderung von Umweltverschmutzung, und um die Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling) zu verbessern, führen Sie nach Ablauf des Produktlebenszyklus die für das Produkt verwendeten Rohstoffe nach ihrer Art dem Recycling zu.

Führen Sie die Verpackungsmaterialien nach ihrer Art dem Recycling zu.



Hinweis: Lassen Sie die Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt, da sie mögliche Gefahrenquellen sind.

Fachhändler-Bestätigung

Der liefernde Fachhändler bestätigt, dass der für

(Name des Kunden)

(Anschrift)

gelieferte Autosicherheitssitz **TONY PLUS** gemäß den individuellen Bedürfnissen ausgestattet und körpergerecht eingestellt ist und somit eine sichere, stabile Sitzposition und ein korrekter Sitz des Dreipunkt-Sicherheitsgurtes gewährleistet ist.

Die Kunden wurden sorgfältig in den Gebrauch und die Benutzung des Hilfsmittels eingewiesen.

(Datum/Ort)

(Unterschrift, Stempel)

Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen

Gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) sind Anwender und Betreiber verpflichtet, jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt auftritt, unverzüglich dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Vorkommnis eingetreten ist, zu melden.

Ein schwerwiegendes Vorkommnis ist jedes Ereignis, das direkt oder indirekt zu

- dem Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person,
- einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustands, oder
- einer ernsthaften Gefahr für die öffentliche Gesundheit

geführt hat, führen könnte oder führen kann.

Bitte melden Sie solche Vorkommnisse an:

RehaNorm GmbH & Co. KG
Am Ockenheimer Graben 50, 55411 Bingen
E-Mail: info@rehanorm.de
Telefon: 06721 906 0

Zuständige Behörde (Deutschland):
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn
Webseite: <https://www.bfarm.de>

Gewährleistung

Gewährleistungsdauer

Die Gewährleistung für dieses Produkt beträgt **24 Monate ab dem Kauf**. Bitte bewahren Sie die Verkaufsunterlagen mit Datum auf.

Um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, setzen Sie sich mit ihrem Fachhändler in Verbindung, der alle weiteren notwendigen Maßnahmen für Sie einleiten wird.

Einschränkungen der Gewährleistung

Diese Gewährleistung beinhaltet nicht Schäden, die durch Nachlässigkeit, fehlerhaftem und unsachgemäßem Gebrauch oder durch Nutzung nicht originaler Teile entstanden sind oder durch falsche Behandlung, weil diese Gebrauchsanweisung nicht beachtet worden ist. Ausgeschlossen sind auch Schäden, die durch einen Unfall entstanden sind.

Ein Gewährleistungsanspruch entfällt auch dann, wenn im Formular für die Gewährleistung der Name und der Stempel des Fachhändlers von dem Sie den Autosicherheitssitz **TONY PLUS** erhalten haben, nicht vorhanden ist oder falls Sie das Formular für die Gewährleistung nicht vorlegen können.

Formular für Gewährleistungsansprüche

Produkt Modell Nummer:	Autosicherheitssitz TONY PLUS
Name, Vorname:	
Straße und Hausnummer:	
Stadt:	
PLZ:	
Telefonnummer:	
E-Mail:	
Kaufdatum:	
Fachhändler:	