

Gebrauchsanweisung

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie die Tony R benutzen.

Tony R

Autosicherheitsrücken



Lieber Kunde,

an dieser Stelle möchten wir Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und den Erwerb unseren Autosicherheitsrücken **Tony R** danken. Bevor Sie allerdings den **Tony R** benutzen, sollten Sie erst einmal aufmerksam die Gebrauchsanweisung durchlesen und unsere Hinweise beachten. So werden Sie den **Tony R** optimal nutzen und dem Benutzer höchste Sicherheit bieten können.

Bei der Montage kann Ihnen Ihr Fachhändler helfen.

Wichtige Information!

Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanweisung bei dem Produkt verbleibt.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Team jederzeit gerne unter (06721) 906 0 oder mit einem Videoanruf zur Verfügung. Wir freuen uns über jede Anregung Ihrerseits zur Verbesserung dieses Produkts per Mail an info@rehanorm.de.

Gute Fahrt mit Ihren Tony R,

Ihre

Andrea Staus und das RehaNorm-Team

Konformitätserklärung

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Patienten oder Anwender bestimmt, für den die Person, die das betreffende Produkt verordnet hat und die aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation durch nationale Rechtsvorschriften dazu befugt ist, die Verordnung ausgestellt hat.

Die betreffenden Informationen zum Patienten oder Anwender bzw. zum Verordner sind bei uns als Hersteller des Produktes einsehbar.

Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen des Anhangs I der Verordnung (EU) 2017/745 des europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017.

Produktbezeichnung: Autosicherheitsrücken **Tony R**

Produktkennzeichnung: befindet sich auf der Rückseite unter dem Bezug.

Hersteller:

RehaNorm GmbH & Co. KG,
Am Ockenheimer Graben 50,
55411 Bingen
Deutschland
Telefon +49 6721 906 0
Telefax +49 6721 906 66,
E-Mail: info@rehanorm.de,

Inhaltsverzeichnis

Konformitätserklärung	3
Inhaltsverzeichnis	4
Warn- und Sicherheitshinweise	5
Was Sie beachten sollten, bevor Sie die TONY R nutzen	5
Produktbeschreibung	6
Grundausrüstung	6
Einbau und Gebrauch	6
Befestigen des Benutzers	6
Rückenlage	7
Rückbanksicherung in Fremdfahrzeugen	7
Zubehör	8
Kopfstütze	8
Gurtführungsflasche rechts und/oder links	8
Abklappbare Rumpfpelotten rechts und/oder links	8
Kopfstütze klettbar, aus Schaumstoff	9
Hinterhauptpolster	9
Brustgurt	9
Vierpunktgurt	9
Beckengurt mit Pressverschluss	9
Lendenwirbel-Stützpelotte	9
Sitzkeilkissen nach Maß	9
Brustschulterleibchen	9
Pflege und Instandhaltung	9
Pflege	9
Instandhaltung	9
Sicheres Entsorgen	9
Fachhändler-Bestätigung	10
Gewährleistung	11
Gewährleistungsdauer	11
Einschränkungen der Gewährleistung	11
Formular für Gewährleistungsansprüche	11



Warn- und Sicherheitshinweise

Achtung, ernsthafte und sogar tödliche Verletzungen können auftreten, wenn die folgenden Hinweise nicht beachtet werden!

Angaben im Sinne der Dritten Verordnung über straßenverkehrsrechtliche Vorschriften vom 05. Juni 1990:

Der **Tony R** ist verwendbar als Rückhaltesystem mit folgenden Bestimmungen:

- Nach vorne gerichtete Rückhaltevorrückung für Kinder und Erwachsene
- Nicht integriert
- Typ des Gurtes: Dreipunkt-Sicherheitsgurt (für Erwachsene)
- Sonstige Ausführungen: Kompletter Sitz
- Fabrik- und Handelsmarke **Tony R**
- Herstellerbezeichnung der Rückhalteeinrichtung für Kinder **Tony R**

Was Sie beachten sollten, bevor Sie die TONY R nutzen

Der Autosicherheitsrücken **Tony R** darf nur in Verbindung mit dem 3-Punkt-Gurt Ihres Fahrzeuges benutzt werden.

Achten Sie beim Anlegen der Gurte, dass diese straff gespannt und nicht verdreht sind. Gebrauchen Sie keinen Sicherheitsgurt, der beschädigt ist, z.B. durch Zigarettenglut angeschmort ist.

Wurde der Autosicherheitsrücken **Tony R** bei einem Unfall stark belastet, ist es ratsam, ihn auszuwechseln.

Grundsätzlich darf der Autosicherheitsrücken **Tony R** keinen Umgebungstemperaturen über 50°C ausgesetzt werden, wie beispielsweise offenes Feuer oder Sauna.

Bedenken Sie, dass Sie bei Veränderung des Autosicherheitsrückens **Tony R** in irgendeiner Weise ohne Genehmigung der zuständigen Behörde den Benutzer zusätzlichen Gefahren aussetzen können. Ein Umbau des Produkts geschieht in Ihrer Verantwortung. Wir sind nicht für Schäden verantwortlich, die in Folge eines nicht korrekten Umbaus auftreten.

Eine mangelhaft angebrachte Autosicherheitsrücken **Tony R** kann zu einem hohen Todes- oder Verletzungsrisiko führen.

Verwenden Sie den Autosicherheitsrücken **Tony R** nicht, wenn sie auf dem Beifahrersitz befestigt ist und Sie dann an der Betätigung der Gangschaltung oder an der Handbremse behindert.

Sichern Sie Ihr Gepäck so, dass es Sie und die Insassen, im Falle eines Unfalls, nicht verletzt.

Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt im Auto.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf. Bei Verlust der Gebrauchsanweisung kann jederzeit eine aktuelle Version unter www.rehanorm.de heruntergeladen werden.

Produktbeschreibung

Der Autosicherheitsrücken **Tony R** ist geeignet für den Autotransport von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit diversen Behinderungen.

Die maximale Belastung sollte aber 120 kg nicht überschreiten.

Eine körpergerechte Einstellung in Verbindung mit dem individuell erforderlichen Zubehör sichert eine stabile und korrekte Sitzposition, wobei der Dreipunkt-Sicherheitsgurt Ihres Fahrzeuges für die optimale Rückhaltesicherheit sorgt.

Grundausrüstung

- Autosicherheitsrücken **Tony R** inkl. Bezug
- feste Pelotten (Paar)
- Sicherungsgurte hinten (Paar)
- Klippanverschlüsse (hinten)



Hinweis: Der Autosicherheitsrücken **Tony R** darf nur in Verbindung mit dem Dreipunkt-Sicherheitsgurt Ihres Fahrzeuges benutzt werden

Einbau und Gebrauch

Der Autosicherheitsrücken **Tony R** kann in Abhängigkeit der gewählten Position der Gurtführungslasche für den Autosicherheitsgurt auf dem rechten bzw. linken Sitzplatz der hinteren Sitzbank Ihres Fahrzeuges postiert werden.



Hinweis: Bei Erhalt Ihres Autosicherheitsrückens **Tony R** wurde dieser von Ihrem Fachhändler auf die Bedürfnisse des Benutzers und den Vorgaben Ihres Autos korrekt angepasst und eingestellt.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt im Fahrzeug ist unbedingt notwendig, um den Autosicherheitsrücken **Tony R** anzubringen und dem Benutzer die größtmögliche Sicherheit zu geben.

Befestigen des Benutzers

- Nachdem Sie den Benutzer mit dem Gurt des **Tony R** positioniert haben, ziehen Sie den Dreipunkt-Sicherheitsgurt des Fahrzeuges heraus und stecken dessen Schlosszunge in das Gurtschloss.
- Dabei legen Sie den Schultergurt des Fahrzeug-Dreipunktgurtes in die Gurtführung des Schulterbereiches ein. Danach straffen Sie den Gurt im Schulterbereich.
- Wenn Sie den **Tony R** mit dem Dreipunkt-Sicherheitsgurt auf dem Sitz gesichert haben, überzeugen Sie sich, dass der Hals und das Gesicht des Benutzers nicht von dem Gurt gestört werden. Achten Sie darauf, dass das Gurtschloss des Fahrzeug-Dreipunktgurtes unterhalb der Gurtführung im Sitzbereich liegt. Nur dadurch ist die richtige Lastenteilung in die Gurtführung

gewährleistet. Sollte das Gurtschloss des Fahrzeug-Dreipunktgurtes oberhalb der Gurtführung liegen, sprechen Sie bitte Ihren Fachhändler an.

- Der Fahrzeug-Dreipunktgurt muss vor Beginn der Fahrt gespannt werden und straff am Benutzer anliegen. Außerdem darf der Gurt nicht verdreht sein.
- Wenn Sie im Zweifel sind, ob Sie den **Tony R** und den Benutzer richtig positioniert haben, sprechen Sie Ihren Fachhändler an.

Rückenlage

- Lehnen Sie den Rücksitz nicht zu weit zurück. Eine zu starke Rückenlage könnte den Sicherheitsgurt in seiner Wirkung reduzieren und gefährlich machen.
- Der **Tony R** alleine gewährleistet nicht die Sicherheit Ihres Kindes im Falle einer Kollision. Der **Tony R** ist ein zusätzlicher Sitz, entwickelt für besondere Kinder, die Schwierigkeiten haben, im Auto zu sitzen. Es ist für Benutzer gefährlich, eine liegende Position im Auto einzunehmen, da der Sicherheitsgurt dann verminderte Wirkung zeigt. Vergessen Sie nicht, den Sicherheitsgurt ihres Autos anzulegen, nachdem Sie die Gurte und Polster des **Tony R** angebracht haben.

Rückbanksicherung in Fremdfahrzeugen

Bei einigen PKW/Kombis, Vans, Kleinbussen und Transportbussen, die eingesetzt werden für den Transfer zu den Kindergärten, Sonderschulen und Werkstätten, besteht das Problem, dass die Sicherheitsgurte für o.a. Kinder-Autosicherheitssitz-Systeme nicht zur Anwendung kommen können. Dies ist immer der Fall, wenn der Übergang vom Sitzpolster zum Rückenpolster geschlossen ist und keine Gurte durchgeführt werden können.

- Der Zusatzgurt für die Rückbanksicherung wird waagrecht zur Sitzfläche um die Rückenlehne des Fahrzeuges gespannt.
- Die versteifte, geschlossene Vorderplatte liegt auf der Rückenlehne auf. Die Unterkante der Vorderplatte befindet sich ca. 10-20 cm über der Sitzfläche.
- Die Enden des Zusatzgurtes werden um die Rückenlehne geführt und die oberen und unteren Gurtenden werden mittels der Pressverschlüsse miteinander verbunden. Zuletzt sind die geschlossenen Gurte noch einmal maximal zu spannen.
- Nun sind die Sicherungsgurte des Kinder-Autositzes zwischen Rückenpolster des Fahrzeug-Sitzes und der versteiften Vorderplatte des Zusatzgurtes durchzuführen und nach oben um die Kopfstütze/Kopfstützenholme zu legen und über die Verschlüsse am Autositz zu sichern (siehe Beschreibung des betreffenden Autositzes).

Hinweis: Nachspannen nicht vergessen.



Überprüfen Sie noch einmal, ob die Gurtverbindungen fest arretiert sind. Achten Sie darauf, dass der Gurt nicht verdreht ist.

Die Verwendung des Dreipunkt-Sicherheitsgurtes des Fahrzeuges ist wie in der betreffenden Gebrauchsanweisung weiterhin unbedingt erforderlich.

Zubehör

Durch diesen nachfolgend aufgelisteten Zubehör können Sie Ihren Autosicherheitsrücken **Tony R** optimal an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen und seine Sicherheit erhöhen.

Kopfstütze

Um eine sichere und angenehme Sitzhaltung Ihres Kindes zu gewährleisten, ist eine Fixierung des Kopfes sehr wichtig. Die Höhe der Kopfstütze kann je nach Bedarf für den Benutzer eingestellt werden.

Einstellung der Kopfstütze

- Öffnen Sie den Bezug am Rücken.
- Schrauben Sie die selbstsichernden Muttern mit einem 8 mm-Steck- oder Maulschlüssel ab.
- Stellen Sie die richtige Höhe ein und schrauben Sie die die Muttern wieder fest.
- Schließen Sie den Bezug per Reißverschluss zu.




Abklappbare Rumpfpelotten rechts und/oder links

Optionales Zubehör (A)

Die abklappbaren Seitenführungen erleichtern Ein- und Ausstieg
Gurtführungslasche rechts und/oder links

Optionales Zubehör (B)

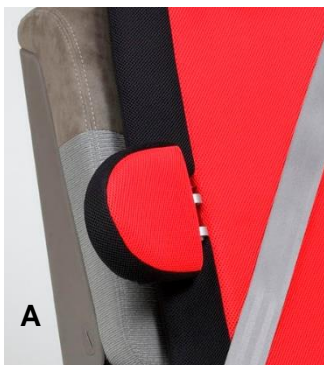

Kopfstütze klettbar, aus Schaumstoff

Hinterhauptpolster

Brustgurt

Vierpunktgurt

Beckengurt mit Pressverschluss

Lendenwirbel-Stützpelotte

Sitzkeilkissen nach Maß

Brustschulterleibchen

Pflege und Instandhaltung

Pflege

Die verwendeten Stoffe sind nach DIN EN 1021 1 und 2 schwer entflammbar.

- Der Bezug ist abnehmbar und waschbar bei maximal 30 Grad.
- Benutzen Sie keinen Weichspüler
- Lassen Sie die Stoffteile nicht in der chemischen Reinigung waschen
- Bei Beschädigung sollte der Stoff ausgetauscht werden.
- Trocknen Sie die Teile auf einem Wäscheständer in einem gut durchlüfteten Raum
- Sind Körpersekrete in den Bezug eingedrungen, desinfizieren Sie diese Stellen großflächig mit einem haushaltsüblichen Desinfektionsmittel (z.B. Sagrotan oder Ähnliches).

Instandhaltung

Bitte führen Sie eine tägliche Sichtprüfung durch und kontrollieren regelmäßig den **Tony R** auf fehlende Teile, lockere Schrauben und Fehlfunktionen. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt oder einer Fehlfunktion direkt an den ausliefernden Fachhändler.

Sicheres Entsorgen

Zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt, der Verhinderung von Umweltverschmutzung, und um die Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling) zu verbessern, führen Sie nach Ablauf des Produktlebenszyklus die für das Produkt verwendeten Rohstoffe nach ihrer Art dem Recycling zu.

Führen Sie die Verpackungsmaterialien nach ihrer Art dem Recycling zu.



Hinweis: Lassen Sie die Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt, da sie mögliche Gefahrenquellen sind.

Fachhändler-Bestätigung

Der liefernde Fachhändler bestätigt, dass der für

(Name des Kunden)

(Anschrift)

gelieferte Autosicherheitsrücken **Tony R** gemäß den individuellen Bedürfnissen ausgestattet und körpergerecht eingestellt ist und somit eine sichere, stabile Sitzposition und ein korrekter Sitz des Dreipunkt-Sicherheitsgurtes gewährleistet ist.

Die Kunden wurden sorgfältig in den Gebrauch und die Benutzung des Hilfsmittels eingewiesen.

(Datum/Ort)

(Unterschrift, Stempel)

Gewährleistung

Gewährleistungsdauer

Die Gewährleistung für dieses Produkt beträgt **24 Monate ab dem Kauf**. Bitte bewahren Sie die Verkaufsunterlagen mit Datum auf.

Um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, setzen Sie sich mit ihrem Fachhändler in Verbindung, der alle weiteren notwendigen Maßnahmen für Sie einleiten wird.

Einschränkungen der Gewährleistung

Diese Gewährleistung beinhaltet nicht Schäden, die durch Nachlässigkeit, fehlerhaftem und unsachgemäßem Gebrauch oder durch Nutzung nicht originaler Teile entstanden sind oder durch falsche Behandlung, weil diese Gebrauchsanweisung nicht beachtet worden ist. Ausgeschlossen sind auch Schäden, die durch einen Unfall entstanden sind.

Ein Gewährleistungsanspruch entfällt auch dann, wenn im Formular für die Gewährleistung der Name und der Stempel des Fachhändlers von dem Sie den **Autosicherheitsrücken Tony R** erhalten haben, nicht vorhanden ist oder falls Sie das Formular für die Gewährleistung nicht vorlegen können.

Formular für Gewährleistungsansprüche

Produkt Modell Nummer:	Autosicherheitsrücken Tony R
Name, Vorname:	
Straße und Hausnummer:	
Stadt:	
PLZ:	
Telefonnummer:	
E-Mail:	
Kaufdatum:	
Fachhändler:	