

# Gebrauchsanweisung

## **Sitzhilfe Gravity Chair**

(barrierefreie Version)

### **Hinweis zur Barrierefreiheit**

Dieses Dokument ist barrierefrei gestaltet. Es ist für blinde und sehbehinderte Personen geeignet und kann mit Screenreadern vollständig erfasst werden. Die Struktur folgt einer klaren Überschriftenhierarchie und verzichtet auf ausschließlich visuelle Verweise.

### **Inhaltsverzeichnis**

<b>Produktname</b> .....	2
<b>Allgemeine Hinweise</b> .....	2
<b>Hersteller- und Konformitätsangaben</b> .....	3
<b>Produktbeschreibung</b> .....	3
<b>Zweckbestimmung</b> .....	4
<b>Indikationen</b> .....	4
<b>Neuromuskulären Erkrankungen</b> .....	4
<b>Erkrankungen des zentralen Nervensystems</b> .....	5
<b>Orthopädischen Erkrankungen</b> .....	5
<b>Sensorischen Verarbeitungsstörungen</b> .....	5
<b>Sekundären Atemeinschränkungen</b> .....	5
<b>Kontraindikationen</b> .....	5
<b>Anwendungsbereich</b> .....	6
<b>Wiedereinsatz</b> .....	6
<b>Grundausrüstung</b> .....	6

<b>Optionales Zubehör (Auswahl)</b> .....	7
<b>Nutzung des Beckengurtes</b> .....	7
<b>Warn- und Sicherheitshinweise</b> .....	8
<b>Risiken</b> .....	8
<b>Pflege und Reinigung</b> .....	8
<b>Kunstlederbezug</b> .....	8
<b>Inlay</b> .....	9
<b>Desinfektion</b> .....	9
<b>Wartung und Instandhaltung</b> .....	9
<b>Produktlebensdauer</b> .....	9
<b>Lagerung und Entsorgung</b> .....	10
<b>Gewährleistung</b> .....	10
<b>Technische Daten</b> .....	10
<b>Größen</b> .....	10
<b>Maximales Benutzergewicht</b> .....	11
<b>Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen</b> .....	12
<b>Ausgabe</b> .....	12

## **Produktname**

Gravity Chair – ergonomische Sitzhilfe für Stabilitäts- und Entspannungstherapie

## **Allgemeine Hinweise**

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie den Gravity Chair benutzen. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

Der Gravity Chair ist kein Spielzeug.

## **Hersteller- und Konformitätsangaben**

Das Produkt entspricht der EU-Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.

Hersteller:

Seeds Co. LTD, Meshiro-cho 705-16, Isahaya-City,

Nagasaki-ken, Japan

EU-Importeur und Bevollmächtigter:

RehaNorm GmbH & Co. KG,

Am Ockenheimer Graben 50, 55411 Bingen, Deutschland

Telefon: +49 6721 906 0

E-Mail: [info@rehanorm.de](mailto:info@rehanorm.de)

Die Produktkennzeichnung befindet sich unter dem Bezug an der Seite mit dem Reißverschluss.

## **Produktbeschreibung**

Der Gravity Chair ist eine ergonomische Sitzhilfe zur stabilen Positionierung von Personen mit eingeschränkter Sitzfähigkeit.

Er unterstützt:

- Aufrichtung des Beckens
- Seitliche Stabilisierung von Rumpf und Oberkörper
- Druckentlastung und Schmerzreduktion
- Verbesserung der Atmung und der Kopfkontrolle

Der Sitz besteht vollständig aus Schaumstoff mit Kunstlederbezug und bietet eine großflächige, weiche Körperunterstützung.

## **Zweckbestimmung**

Der Gravity Chair dient der therapeutischen Versorgung von Personen mit motorischen oder neurologischen Einschränkungen.

Ziele:

- Sichere und komfortable Sitzposition
- Unterstützung der Atemfunktion
- Prävention von Druckstellen
- Förderung sozialer Teilhabe (Blickkontakt, Kommunikation)
- Unterstützung bei Pflege, Transfer und Nahrungsaufnahme

Der Gravity Chair ist in mehreren Größen erhältlich.

## **Indikationen**

Der Gravity Chair ist geeignet bei:

### **Neuromuskulären Erkrankungen**

Zum Beispiel:

- Zerebralparese

- Spinale Muskelatrophie
- Muskeldystrophien
- Spastische Tetraparese

## **Erkrankungen des zentralen Nervensystems**

Zum Beispiel:

- Schädel-Hirn-Trauma
- Schlaganfall
- Multiple Sklerose
- Therapieresistente Epilepsie

## **Orthopädischen Erkrankungen**

Zum Beispiel:

- Skoliose
- Hüftdysplasie oder Hüftluxation

## **Sensorischen Verarbeitungsstörungen**

Zum Beispiel:

- Sensorische Integrationsstörungen
- Visuelle Beeinträchtigungen

## **Sekundären Ateemeinschränkungen**

## **Kontraindikationen**

Nicht geeignet bei:

- Fehlender Rumpfstabilität ohne zusätzliche Fixierung
- Unkontrollierten Bewegungen
- Medizinischen Gründen, die eine Sitzposition ausschließen

## **Anwendungsbereich**

Der Gravity Chair ist für:

- Häuslichen Bereich
- Therapie- und Pflegeeinrichtungen
- Schulische und betreuende Umfelder

## **Wiedereinsatz**

Der Gravity Chair ist für den Wiedereinsatz geeignet. Vor erneutem Einsatz muss er gereinigt, desinfiziert und durch autorisiertes Fachpersonal geprüft und freigegeben werden.

## **Grundausrüstung**

Die Grundausrüstung umfasst:

- Schaumstoffkern mit abwaschbarem Kunstlederbezug
- Verstellbare Kopfstütze mit Klettbefestigung
- Einlegepolster (Inlay) aus atmungsaktivem Material
- Beckengurt zur Fixierung
- Dreieckkeil zur Sitzwinkelanpassung oder als Fußstütze
- Gurthalterungen an den Armlehnen

- Sitztiefenabstandshalter
- Tasche für Zubehör und Anleitung

## **Optionales Zubehör (Auswahl)**

- Füllpolster zur Sitzbreitenanpassung
- Sitztiefen- und Höhenpolster
- Therapietisch
- Inkontinenzeinlage
- Abduktionskeil
- Beinablagepolster
- Schaukel (nicht für Therapie, nur Alltag)
- Fahruntergestell mit feststellbaren Rollen

Nicht alle Zubehörteile sind miteinander kombinierbar.

## **Nutzung des Beckengurtes**

- Öffnen Sie den Beckengurt vollständig.
- Führen Sie die Gurtenden in die elastischen Gurthalterungen an den Armlehnen ein.
- Setzen Sie den Benutzer in den Stuhl.
- Schließen und justieren Sie den Gurt körpernah, aber nicht einschnürend.

## **Warn- und Sicherheitshinweise**

- Lassen Sie den Benutzer niemals unbeaufsichtigt im Gravity Chair.
- Heben Sie den Stuhl niemals mit dem Benutzer an den Griffen an.
- Verwenden Sie den Stuhl nur mit Bezug.
- Halten Sie Abstand zu offenen Flammen und Heizquellen.

Eine Sitzposition sollte spätestens nach 30 Minuten verändert werden.

## **Risiken**

Mögliche Risiken bei unsachgemäßer Nutzung:

- Herausfallen bei Spasmen
- Umkippen bei falscher Positionierung
- Überhitzung oder Kälte bei extremen Temperaturen

Der Gravity Chair ist kein Spielzeug.

## **Pflege und Reinigung**

### **Kunstlederbezug**

- Mit feuchtem Tuch und milder Seifenlauge reinigen
- Keine lösungsmittelhaltigen Reiniger
- Keine Scheuermittel

## **Inlay**

- Waschbar bis 40 Grad
- Schonwaschgang
- Kein Trockner, kein Bügeln

## **Desinfektion**

Geeignete Mittel:

- Descosept
- Incidin

Nicht empfohlen:

- Mikrocid sensitive liquid
- Incidin liquid

Vor großflächiger Anwendung an unauffälliger Stelle testen.

## **Wartung und Instandhaltung**

- Tägliche Sichtprüfung empfohlen
- Jährliche Wartung durch Fachhandel erforderlich
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile

## **Produktlebensdauer**

Bei sachgemäßer Nutzung mindestens 5 Jahre.

Inkontinenz kann die Lebensdauer verkürzen.

## **Lagerung und Entsorgung**

- Trocken, bei Raumtemperatur lagern
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Entsorgung über Haus- oder Sperrmüll.

## **Gewährleistung**

- Gewährleistungsdauer: 24 Monate ab Kaufdatum
- Voraussetzung: sachgemäße Nutzung und Wartung

Bitte wenden Sie sich im Gewährleistungsfall an Ihren Fachhändler.

## **Technische Daten**

Die Größe des Gravity Chair richtet sich nach der Körpergröße der Person.

Wenn man etwas mehr Halt möchte, kann man eine etwas kleinere Größe wählen.

Wenn man unsicher ist, sollte man den Stuhl vorher ausprobieren.

## **Größen**

Es gibt 5 Größen:

S – M – L – LL – LLW

Die Körpergröße hilft bei der Auswahl der richtigen Größe.

Körpergröße der Person

Größe S: 90 bis 110 cm

Größe M: 110 bis 130 cm

Größe L: 130 bis 150 cm

Größe LL/LLW: 150 bis 170 cm

(LLW ist für besonders breite Sitzfläche.)

Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzbreite sind je nach Größe unterschiedlich.

Jede Größe hat ein bestimmtes maximales Benutzergewicht.

### **Maximales Benutzergewicht**

Größe S: bis 30 kg

Größe M: bis 50 kg

Größe L: bis 70 kg

Größe LL: bis 100 kg

Größe LLW: bis 120 kg

Wichtige Zusatz-Hinweise

Die angegebene Sitzhöhe gilt:

ohne Dreieckkeil

und mit Dreieckkeil

Wenn eine Schaukel benutzt wird, wird die Sitzhöhe je nach Größe um etwa 16 bis 20 cm höher.

Wenn ein Fahruntergestell benutzt wird, wird die Sitzhöhe um 20 cm höher.

## **Meldung von schwerwiegenden**

### **Vorkommnissen**

Wenn es bei der Verwendung des Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt, informieren Sie bitte unverzüglich den Hersteller und die zuständige Behörde Ihres Landes.

## **Ausgabe**

Version: Rev. 01

Ausgabe 01/2026

Sprache: Deutsch