

Gebrauchsanweisung

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie den MTS benutzen.

Mannheimer Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl (kurz MTS)



Sehr geehrte Eltern,

vielen Dank, dass Sie sich für den Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl entschieden haben.

Bevor Sie diesen seinem Zweck zuführen, sollten Sie erst einmal die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und unsere Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Gerät beachten.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Team jederzeit gerne unter (06721) 906 0 oder mit einem Videoanruf zur Verfügung. Wir freuen uns über jede Anregung Ihrerseits zur Verbesserung dieses Produkts per Mail an info@rehanorm.de.

Viel Freude mit Ihrem Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl,

Ihre

Andrea Staus und das RehaNorm-Team

EU- Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass das Produkt den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) vom 5. April 2017 über Medizinprodukte entspricht. Die Herstellung geschieht unter Kontrolle eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 13485:2016 unter Berücksichtigung der Regelungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) vom 5. April 2017 über Medizinprodukte.

Unsere Produktkennzeichnung finden Sie auf dem hinteren Quer-Rohr.

Hersteller:

RehaNorm GmbH & Co. KG,
Am Ockenheimer Graben 50,
55411 Bingen
Deutschland
Telefon +49 67 21/90 60,
Telefax +49 67 21/90 66 6,
E-Mail: info@rehanorm.de,
www.rehanorm.de



Inhaltsverzeichnis

EU- Konformitätserklärung	2
Inhaltsverzeichnis	3
Produktbeschreibung	5
Zweckbestimmung/Indikation	5
Anwendungsrisiken/Kontraindikationen	5
Wiedereinsatz	5
Warn- und Sicherheitshinweise	6
Was zu beachten ist, bevor Sie den MTS benutzen	6
Grundausrüstung	7
Lieferumfang	7
Einstellungen/Montage	7
Verstellung der Sitzneigung mit der Gasdruckfeder	7
Verstellung der Sitzhöhe	8
Radfeststellung	8
Zubehör und Funktionen	8
Fußbank	8
Kopfstütze	9
Sicherheitsbügel	9
Toiletteneinrichtung	9
ArMLEHnen höhenverstellbar	10
Toilettenausschnittverkleinerer	10
Weiteres optionales Zubehör	10
Pflege und Wartung	11
Reinigung und Desinfektion	11
Reinigung des Toiletten- und Duschsitzschalenstuhls	11
Reinigung der Bezüge und Polster	11
Instandhaltung	11
Überprüfung auf Beschädigungen und auf Funktionsfähigkeit	12
Formular für Funktionsfähigkeitsprüfung	12
Produktlebensdauer	13
Nutzungsdauer	13

Lebensdauer	13
Entsorgung.....	13
Verpackung	13
Produkt.....	13
Technische Daten	14
Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen.....	14
Gewährleistung.....	15
Gewährleistungsdauer.....	15
Einschränkungen der Gewährleistung	15
Formular für Gewährleistungsansprüche	15

Vorbemerkungen:

Die Fachhändler werden gebeten, diese Gebrauchsanweisung dem Benutzer zu übergeben.
Wir weisen darauf hin, dass das gelieferte Produkt durch individuelle Anpassungen von dem hier beschriebenen abweichen kann.

Hinweis zur Barrierefreiheit:

Diese Gebrauchsanweisung ist in einer für blinde und sehbehinderte Versicherte geeigneten, barrierefreien digitalen Form verfügbar und kann auf der Webseite www.rehanorm.de heruntergeladen werden.

Produktbeschreibung

Der Mannheimer Dusch-Toilettensitzschalenstuhl bietet sicheren Halt und hohen Sitzkomfort.

Die anatomisch geformte Sitzschale unterstützt die typische Spreizhaltung der Oberschenkel beim Toilettengang. Ein Sicherheitsbügel verhindert ein Vorwärtsrutschen. Zusätzlich kann ein Beckenbügel montiert werden, der sanften Druck auf den Unterbauch ausübt – insbesondere, wenn der Benutzer sich nach vorne beugt.

Die integrierte Neigungsverstellung ermöglicht eine Anpassung der Sitzposition nach hinten. Diese Eigenschaften machen den Sitzschalenstuhl zu einem effektiven Hilfsmittel beim Toilettentraining.

Die Ortho-Dynamik-Sitzschale gewährleistet auch bei längeren Sitzzeiten beschwerdefreies Sitzen. Optional kann der Sitz zusätzlich mit Polstern ausgestattet werden, um den Komfort weiter zu erhöhen. Für Patienten, die eine individuelle Sitzanpassung benötigen, kann eine Einfräsung aus geschlossporigem Schaumstoff integriert werden.

Der Sitzschalenstuhl ist mit vier Rollen ausgestattet, wodurch er leicht über das Toilettenbecken bewegt werden kann. Optional ist die Verwendung eines Toiletteneimers möglich.

Alle Metallteile bestehen aus Aluminium oder Edelstahl, die Polster aus nassfestem Schaumstoff. Dadurch ist der Sitzschalenstuhl auch für die Nutzung in der Dusche geeignet.

Zweckbestimmung/Indikation

Der Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl findet Anwendung im häuslichen und im stationären Bereich. Er dient pflegebedürftigen Patienten mit eingeschränktem Bewegungsradius und/oder eingeschränkten Körperkontrollfunktionen bei der Toilettenbenutzung und der Benutzung der Dusche. Ausgelegt ist der Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl für ein maximales Benutzergewicht von 120 kg.

Anwendungsrisiken/Kontraindikationen

Bei sachgerechtem Gebrauch können Anwendungsrisiken ausgeschlossen werden. Kontraindikationen sind nicht bekannt.

Wiedereinsatz

Der Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl ist für den Wiedereinsatz geeignet. Vor dem Wiedereinsatz muss das Produkt gereinigt, desinfiziert und durch einen autorisierten Service für den Wiedereinsatz freigegeben werden.

Warn- und Sicherheitshinweise



Achtung, ernsthafte Verletzungen können auftreten, wenn die folgenden Hinweise nicht beachtet werden!

Was zu beachten ist, bevor Sie den MTS benutzen

- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen sowie nach allen Einstellarbeiten sämtliche Schraubverbindungen auf festen Sitz und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.
- Verwenden Sie den Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl ausschließlich in Innenräumen; eine Nutzung im Freien ist nicht zulässig.
- Nutzen Sie den Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl nur auf festem, ebenem und horizontalem Untergrund.
- Vermeiden Sie ein weites Herauslehnen aus dem Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl, um Stürze zu verhindern.
- Treten Sie beim Ein- und Aussteigen niemals auf das Fußbrett, um das Risiko eines Sturzes zu vermeiden.
- Stellen Sie den Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl stets auf festgestellten Rädern ab; dies ist insbesondere beim Kippen der Sitzschale zwingend erforderlich.
- Vor jedem Ein- und Aussteigen müssen die Räder festgestellt sein.
- Zum Überwinden von Hindernissen (z. B. Treppen) mit Insassen dürfen nur vorgesehene Einrichtungen wie Auffahrampen oder Aufzüge genutzt werden. Fehlen solche Einrichtungen, darf das Hindernis nur durch mindestens zwei Helfer überwunden werden. Fassen Sie den Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl dabei ausschließlich am stabilen Aluminiumrahmen an; heben Sie das Gerät **nicht an der Sitzschale**.
- Der Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl ist **nicht für längeres Sitzen konzipiert**. Nach der Toilettennutzung sollte wieder eine andere Sitz- oder Liegemöglichkeit verwendet werden.
- Die Toilettenschüssel kann zum Reinigen oder Entleeren nach hinten herausgenommen und wieder unter die Sitzschale geschoben werden. Achten Sie stets auf festen Sitz der Toilettenschüssel.
- Sie können den Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl direkt über ein fest installiertes Toilettenbecken fahren, sofern die Sitzhöhen von Becken und Stuhl kompatibel sind. Stellen Sie dabei immer die Bremse fest, um die Sicherheit zu gewährleisten.



Wichtig: Kontrollieren Sie den Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl vor jedem Gebrauch. Prüfen Sie auf lose Teile, scharfe Kanten, heiße Oberflächen, lockere Gurte, nicht funktionierende Mechanismen oder andere potenzielle Gefahrenquellen, bevor ein Patient in den Stuhl gesetzt wird.

Grundausrüstung

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten ist der fertig montierte Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl mit einer Ortho-Dynamic-Sitzschale aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Schiebegriffen und 75 mm Rollen inkl. Feststellbremse für die Größen 2 und 3 sowie 100 mm Rollen für die Größen 4 bis 7.

Das Zubehör ist entsprechend Ihrer Bestellung bereits montiert. Er ist komplett aus nichtrostendem Material hergestellt worden und kann daher auch als Duschstuhl benutzt werden.

Diese Gebrauchsanweisung gehört ebenfalls zum Produkt und sollte gut aufbewahrt werden.

Einstellungen/Montage




Alle Einstellarbeiten dürfen nur am nicht benutzten Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl ohne Insassen vorgenommen werden. Kontrollieren Sie nach Verstellarbeiten alle Verbindungen auf festen Sitz.

Verstellung der Sitzneigung mit der Gasdruckfeder

In der Sitzneigung ist der Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl standartmäßig durch die Auslösung eines Handhebels **(A)** am Schiebegriff **(B)** verstellbar.

Durch betätigen des Handhebels nach unten lässt sich die Schale ca. 30° nach hinten neigen. Sobald Sie den Handhebel loslassen, ist die Schale arretiert.

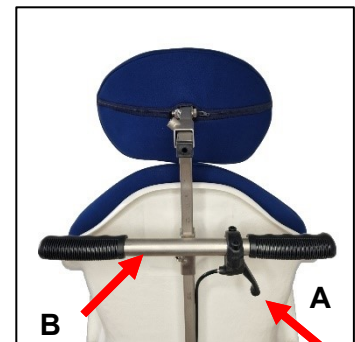

Optional wird die Sitzneigung der Schale über eine Fußpedal **(C)**, die sich an der Seite des unteren Rahmens befindet, verstellt.

Die Gasdruckfeder-Verstellung ist aus technischen Gründen nur bei den Größen 3 bis 7 möglich.




Verstellung der Sitzhöhe

Der Sitz ist höhenverstellbar.

Verstellung der Sitzhöhe:


- Lösen Sie die Schrauben **(A)** links und rechts
- Stellen Sie die gewünschte Höhe ein
- die Schrauben wieder festziehen
- die Höhe der Gasdruckfeder an vorderer Querstrebe **(B)** entsprechend anpassen

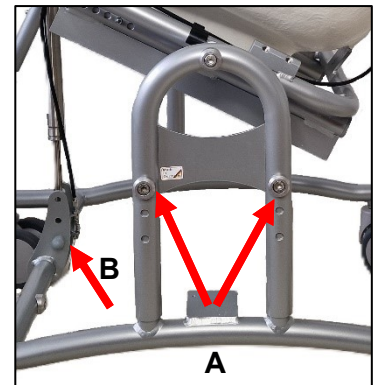

Radfeststellung

Zur Feststellung der Räder betätigen Sie den Fußschalter am Rad durch Heruntertreten des Bremshebels **(A)**.

Zum Lösen der Bremse heben Sie den Schalter mit dem Fuß wieder an. Das feststellen der Räder ist bei der Kantelung auch erforderlich.

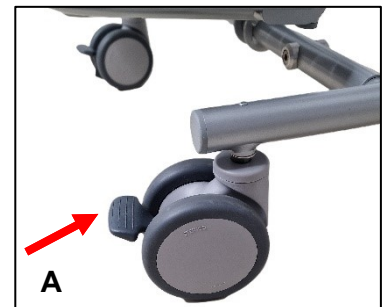


Zubehör und Funktionen

Fußbank

(Optionales Zubehör)

Die Fußbank ist höhenverstellbar. Die Höhe der Fußbank können Sie nach Eindrücken der Stativfedern einstellen.

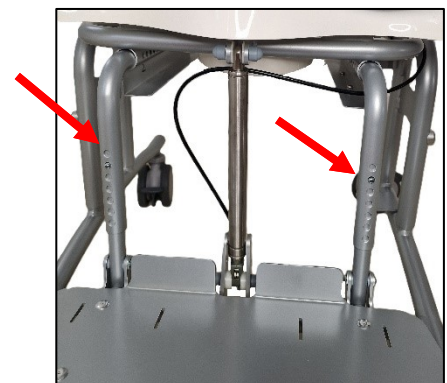

Kopfstütze

(Optionales Zubehör)


Die Kopfstütze ist in Höhe und Tiefe verstellbar.

Zur Tiefenverstellung lösen Sie die Innensechskantschraube **(A)** hinter der Kopfstütze und passen die Tiefe an die Bedürfnisse des Insassen an.

Zur Höhenverstellung lösen Sie die Innensechskantschraube **(B)** hinter der Rückenlehne. Schieben Sie die Kopfstütze in die richtige Höhe.



Hinweis: Nach Einstellarbeiten müssen alle Schraubverbindungen wieder sorgfältig festgezogen werden.

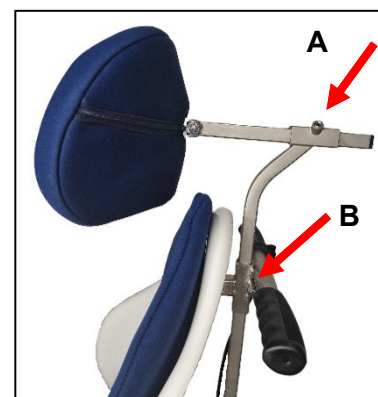

Sicherheitsbügel

(Optionales Zubehör)

Der Sicherheitsbügel, der das Vorrutschen verhindern soll, lässt sich durch Ziehen der Zugschnäpper **(A)** rechts und links vom Sitz, einfach auf das Halterrohr aufstecken und abziehen.

Durch leichtes Lösen des Gewindestiftes lässt sich der Sicherheitsbügel nach vorn oder hinten schieben.



Toiletteneinrichtung

(Optionales Zubehör)

Die Toilettenschüssel lässt sich nach hinten herausziehen. Achten Sie beim Einschieben der Toilettenschüssel darauf, dass Sie bis zum Anschlag nach vorn geschoben wird.



Armlehnen höhenverstellbar

(Optionales Zubehör)

Nach dem Lösen der Innensechskantschrauben **(A)** auf der linken und rechten Seite des Aufnahmerohrs lassen sich die Armlehnen in der Höhe stufenlos verstellen und somit in die gewünschte Stellung bringen.



Hinweis: Nach Einstellarbeiten müssen alle Schraubverbindungen wieder sorgfältig festgezogen werden.



Toilettenausschnittverkleinerer

In manchen Fällen ist ein Toilettenausschnittverkleinerer sinnvoll. Dieser kann auch nach Körperabdruck geformt werden. Überdies ist ein Spritzschutz integrierbar.



Weiteres optionales Zubehör

Sitzpolster inkl. Bezug

Rückenpolster inkl. Bezug

Brustschulterleibchen

2-Punkt-Beckengurt

Abduktionskeil

Fußfixierung gepolstert (Paar)

Rumpfstützpulster

Pflege und Wartung

Reinigung und Desinfektion

Reinigung des Toiletten- und Duschsitzschalenstuhls

- Verwenden Sie einen Schwamm, maximal 30 Grad warmes Wasser und eine milde Seife.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Reiben Sie die Metallteile nach der Reinigung mit einem Tuch trocken.
- Desinfizieren Sie den Toiletten- und Duschsitzschalenstuhls mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln. Sprühen Sie die Sitzschale und das Untergestell ein und wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab, bis er trocken ist.

Reinigung der Bezüge und Polster

- Benutzen Sie keine Waschmaschine, keinen Wäschetrockner und kein Bügeleisen.
- Benutzen Sie keinen Weichspüler
- Lassen Sie die Stoffteile nicht in der chemischen Reinigung waschen
- Bei Beschädigung sollte der Stoff ausgetauscht werden.
- Trocknen Sie die Teile liegend auf einem Wäscheständer in einem gut durchlüfteten Raum
- Sind Körpersekrete in den Bezug eingedrungen, desinfizieren Sie diese Stellen großflächig mit einem haushaltsüblichen Desinfektionsmittel (z.B. Sagrotan oder Ähnliches).

Der Ausschnittverkleinerer kann einfach aus der Schale entnommen werden. Er besteht aus geschlossenporigem Schaumstoff, in den keine Flüssigkeit eindringt. Benutzen Sie Seife und Bürste rundum.

Instandhaltung

Bitte führen Sie eine tägliche Sichtprüfung durch und kontrollieren regelmäßig das Produkt auf Risse, Brüche, fehlende Teile und Fehlfunktionen. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt oder einer Fehlfunktion direkt an den ausliefernden Fachhändler.

Verwenden Sie nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile des Herstellers, da Sie anderenfalls die Sicherheit des Anwenders gefährden und die Gewährleistung erlischt.

Für eine Ersatzteilbestellung wenden Sie sich bitte unter Angabe der Seriennummer der Sitzeinheit an den ausliefernden Fachhändler. Notwendige Ersatzteile und Zubehör dürfen lediglich durch geschultes Personal montiert werden.

Überprüfung auf Beschädigungen und auf Funktionsfähigkeit

Grundsätzlich ist vor jedem Einsatz die Funktionsfähigkeit Beschädigungen die Funktionsfähigkeit der Verstell- und Sicherheitselemente des **MTS** zu überprüfen:

- Beschädigungen an Rahmen, Anbauteilen und Zubehör (Risse, Brüche, verbogene/fehlende Teile)
- Beschädigungen der Polster und Bezüge
- Beschädigungen der Begurtung (Klemmvorrichtungen, Verschlüsse, Nähte)
- Festigkeit der Verbindungen (lose Schrauben oder fehlende Schrauben)
- Funktionsfähigkeit aller Verstellelemente (Schrauben, Auslösehebel, Fußbank)
- Funktionsfähigkeit der Sicherheitselemente (Bremsen)
- Lesbarkeit des Typenschilds

Formular für Funktionsfähigkeitsprüfung

Wartungsvorgaben des Herstellers wurden durchgeführt:

Datum	Fachhandel	Name	Unterschrift

Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn Sie bei dieser Überprüfung Mängel erkennen.

Benötigtes Werkzeug für die Montage- und Wartungsarbeiten

- ein Flachsraubendreher
- Kreuzschraubendreher
- ein 10er Maulschlüssel
- ein 5er Innensechskantschlüssel

Produktlebensdauer

Nutzungsdauer

Das Produkt hat eine erwartete Nutzungsdauer von bis zu **5 Jahren** bei fachgerechter und regelmäßiger Wartung auf Grundlage der Herstellerangaben. Das Produkt kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es sich in einem sicheren und technisch einwandfreien Zustand befindet. Zeiten der Einlagerung beim Fachhandel sind von der Nutzungsdauer ausgenommen.

Die theoretische Nutzungsdauer ist keine garantierte Nutzungsdauer. Sie ist abhängig von der Nutzungsintensität und unterliegt immer einer Einzelfallprüfung durch den Fachhandel.

Die Nutzungsdauer bezieht sich **nicht** auf Verschleißteile wie Polster, Bezüge, Räder, Bremsen, etc.

Lebensdauer

Das Produkt hat eine Lebensdauer von 8 Jahren, wenn die bei der Nutzungsdauer angegebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Lebensdauer setzt sich zusammen aus der Nutzungsdauer und Lagerungszeiten zwischen Wiedereinsätzen.

Entsorgung

Zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt, der Verhinderung von Umweltverschmutzung, und um die Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling) zu verbessern, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Verpackung

Die Verpackung des Produkts sollte für einen eventuell später notwendigen Transport aufbewahrt werden. Falls Sie das Produkt zur Reparatur oder im Gewährleistungsfall zu uns zurückschicken müssen, verwenden Sie bitte nach Möglichkeit den Originalkarton, damit das Produkt optimal verpackt ist. Führen Sie ansonsten die Verpackungsmaterialien nach ihrer Art dem Recycling zu.

Lassen Sie die Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt, da sie mögliche Gefahrenquellen sind.

Produkt

Führen Sie nach Ablauf des Produktlebenszyklus die für das Produkt verwendeten Rohstoffe nach ihrer Art dem Recycling zu.

Technische Daten

Die Änderung der technischen Daten unterliegt der Produktentwicklung und diese behalten wir uns vor.

Größe	2	3	4	5	6	7
Gewicht	8 kg	9 kg	10 kg	12 kg	14 kg	16 kg
Breite insgesamt [cm]	43	48	53	58	63	63
Länge insgesamt [cm]	65	65	65	70	70	70
Sitzbreite hinten [cm]	24	28	34	238	43	43
Sitzbreite vorne [cm]	33	39	45	53	58	60
Weite zwischen Armlehnen [cm]	45	50	55	60	65	65
Sitzhöhe mindestens [cm]	48					
Sitzhöhe maximal [cm]	55					
Sitztiefe [cm]	24	30	36	38	40	52
Rückenhöhe [cm]	37	46	53	60	62	77
Toilettenausschnitt (1) [cm]	12 x 17	14 x 20	16 x 23	18 x 26	20 x 29	20 x 29
Kantelung nach vorn	0°					
Kantelung nach hinten	37°					

(1) Individuelle Anpassung möglich

Maximales Benutzergewicht: 120 kg

Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen

Gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) sind Anwender und Betreiber verpflichtet, jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt auftritt, unverzüglich dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Vorkommnis eingetreten ist, zu melden.

Ein schwerwiegendes Vorkommnis ist jedes Ereignis, das direkt oder indirekt zu

- dem Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person,
- einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustands, oder
- einer ernsthaften Gefahr für die öffentliche Gesundheit

geführt hat, führen könnte oder führen kann.

Bitte melden Sie solche Vorkommnisse an:
 RehaNorm GmbH & Co. KG
 Am Ockenheimer Graben 50, 55411 Bingen
 E-Mail: info@rehanorm.de
 Telefon: 06721 906 0

Zuständige Behörde (Deutschland):
 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
 produkte (BfArM)
 Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn
 Webseite: <https://www.bfarm.de>

Gewährleistung

Gewährleistungsdauer

Die Gewährleistung für dieses Produkt beträgt **24 Monate ab dem Kauf**. Bitte bewahren Sie die Verkaufsunterlagen mit Datum auf.

Um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, setzen Sie sich mit ihrem Fachhändler in Verbindung, der alle weiteren notwendigen Maßnahmen für Sie einleiten wird.

Einschränkungen der Gewährleistung

Diese Gewährleistung beinhaltet nicht Schäden, die durch Nachlässigkeit, fehlerhaftem und unsachgemäßem Gebrauch oder durch Nutzung nicht originaler Teile entstanden sind oder durch falsche Behandlung, weil diese Gebrauchsanweisung nicht beachtet worden ist. Ausgeschlossen sind auch Schäden, die durch einen Unfall entstanden sind.

Ein Gewährleistungsanspruch entfällt auch dann, wenn im Formular für die Gewährleistung der Name und der Stempel des Fachhändlers von dem Sie den **MTS** erhalten haben, nicht vorhanden ist oder falls Sie das Formular für die Gewährleistung nicht vorlegen können.

Formular für Gewährleistungsansprüche

Produkt Modell Nummer:	Mannheimer Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl
Name, Vorname:	
Straße und Hausnummer:	
Stadt:	
PLZ:	
Telefonnummer:	
E-Mail:	
Kaufdatum:	
Fachhändler:	



Version: Rev. 03
Sprache: Deutsch
Stand: 02/2026