

ISO-BASE

für Carrot 3 / Carrot XL

mit ISOFIX-Verbindung

Gebrauchsanleitung

RehaNorm GmbH & Co. KG

Sehr geehrte Eltern,

mit der ISO-BASE haben Sie sich für ein besonders hochwertiges Produkt entschieden. Durch die äußerst solide Bauweise kann es über viele Jahre gebraucht werden. Bei der Montage kann Ihnen Ihr Fachhändler helfen.

Alleinvertrieb:
RehaNorm GmbH & Co. KG
Am Ockenheimer Graben 50, D-55411 Bingen
Telefon (06721) 906 0
Telefax (06721) 906 66

Inhaltsverzeichnis

Bevor Sie die ISO-BASE nutzen	Seite 3
Sicherheitsvorkehrungen	Seite 4
Gebrauch der ISO-BASE	Seite 5
→ 1. Befestigen des Carrot 3 Carrot XL an der ISO-BASE	
→ 2. Ordnungsmäßiges Fixieren am Autositz	
→ 3. Entfernen der ISO-BASE	
Garantie	Seite 6

ISO-BASE

GEBRAUCHSANLEITUNG


Bevor Sie die ISO-BASE benutzen

Um den sicheren Gebrauch der ISO-BASE zu gewährleisten, lesen und beachten Sie bitte die Gebrauchshinweise und besonders die Sicherheitsvorkehrungen. Wir bitten Sie um Verständnis, dass die Anleitung entsprechend der verschiedenen Ausführungen unterschiedlich sein muss. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung gut auf. Ein Garantieschein ist auf der letzten Seite beigelegt. Bitte bewahren Sie ihn sorgfältig auf, so dass Sie ihn im Falle eines Defekts vorlegen können. Die Gebrauchsanleitung muss immer dabei sein, wenn Sie das Produkt Anderen übergeben oder verleihen.

Schaumstoffplatte zum Ausgleich
der Muldung im Autositz

ISOFIX-Verbindung

Halterung für Carrot

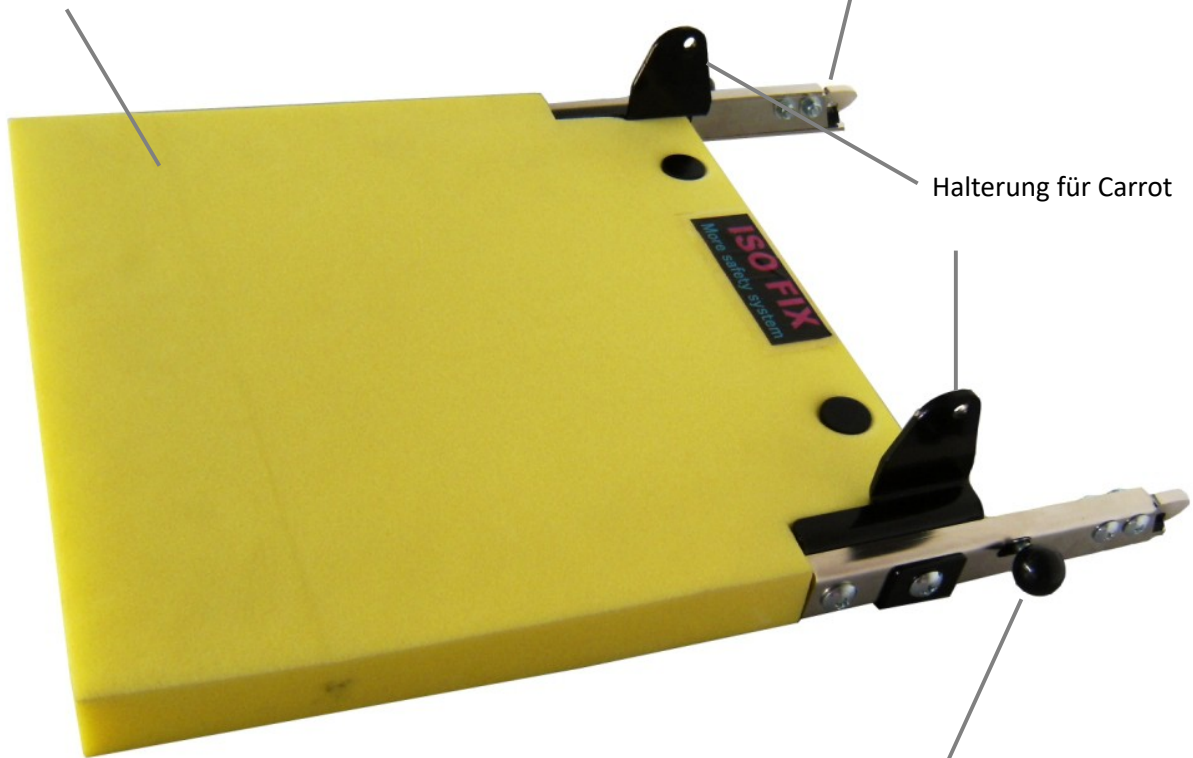

Schiebegriffe zum Lösen der
ISOFIX-Verbindung

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



Achtung (dieses Symbol bedeutet, dass falscher Gebrauch ein hohes Todes- oder Verletzungsrisiko darstellt.)

Folgende Kfz-Sitze sind nicht für den Gebrauch mit der ISO-BASE geeignet: Autositze ohne eine ISOFIX-Verbindung, Autositze, die seitwärts oder rückwärts befestigt sind, Autositze, die weniger als 40 cm tief sind, Autositze mit einer ausgeprägten Wölbung auf dem Sitz, welche zu einer instabilen Befestigung führen kann, Autositze mit einem Zweipunktgurt.

Was Sie beachten sollten, bevor Sie die ISO-BASE nutzen

Transportieren Sie bitte das Kind mit angelegtem Fünfpunktgurt des Carrot 3 / Carrot XL und dem Drei-Punkt-Sicherheitsgurt des Kfz. Ein Umbau des Produkts geschieht in Ihrer Verantwortung. Wir sind nicht für Schäden verantwortlich, die in Folge eines nicht korrekten Umbaus auftreten. Nur die Begleitperson sollte das Produkt bedienen. Nur zur Benutzung in Fahrzeugen geeignet, die mit Drei-Punkt-Sicherheitsgurten ausgerüstet sind. Achten Sie bitte beim Einbau darauf, dass kein Teil der ISO-BASE bei einem normalen Gebrauch des Fahrzeugs unter einen beweglichen Sitz oder in der Türe eingeklemmt werden kann.

Eine mangelhaft angebrachte ISO-BASE kann zu einem hohen Todes- oder Verletzungsrisiko führen. Benutzung nur für bestimmte Kinder und nur mit den oben beschriebenen Autositzen. Wir empfehlen den Platz hinter dem Beifahrer.

Regelmäßige Kontrollen sind notwendig, wenn Sie auf schlechten Straßen fahren sowie vor und nach einer Fahrt.

Die Gebrauchsanleitung muss dem Produkt immer beigelegt sein. Vergessen Sie dies nicht, wenn Sie es anderen Personen überlassen.

Versichern Sie sich, dass die ISOFIX-Verbindung der ISO-BASE mit dem Autositz richtig eingerastet ist.

Benutzen Sie keinen Autositz, der keine ISOFIX-Verbindung aufweist, um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten.

Sichern Sie Ihr Gepäck so, dass es Sie, im Falle eines Unfalls, nicht verletzt.

Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt im Auto.

Wann Sie die ISO-BASE nicht benutzen sollten

Gebrauchen Sie die ISO-BASE nicht, wenn Sie sie nicht richtig, wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben, befestigen können oder wenn die ISO-BASE selbst nach der Anbringung noch nicht fest auf beiden Seiten eingerastet ist. Verwenden Sie das Produkt nicht ohne eine ISOFIX-Verbindung des Autositzes. Benutzen Sie keine anderen Gurte oder Sitzformen, als die, die in der Gebrauchsanleitung beschrieben sind. Um die Sicherheit zu gewährleisten, benutzen Sie das Produkt nicht mehr, wenn es einen Unfall gegeben hat. Verwenden Sie die ISO-BASE nicht, wenn sie auf dem Beifahrersitz befestigt ist und Sie dann an der Betätigung der Gangschaltung oder an der Handbremse behindert. Gebrauchen Sie keinen Sicherheitsgurt, der beschädigt ist, z.B. durch Zigarettenglut angeschmort ist.

Was weiter zu beachten ist


Die ISOFIX-Verbindungen sind so gemacht, dass sie nicht einfach gelöst werden können. Passen Sie trotzdem auf, dass sie von niemandem unsachgemäß bedient werden. Wenn Sie irgendwelche Fragen zum Gebrauch oder zu Reparaturarbeiten haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Gebrauch der ISO-BASE

REGELN zum Anbringen:

1. Befestigen des Carrot 3/Carrot XL


Als erstes lösen und entfernen Sie die Einstellungsschrauben zwischen Sitz und Rücken des Carrot 3/ Carrot XL. Nun stellen Sie den Autosicherheitssitz so auf die ISO-BASE, dass er zwischen den Halterungen der ISOFIX-Verbindung sitzt. Befestigen Sie den Carrot 3 / Carrot XL an der ISO-BASE mit den Feststellschrauben des Carrots, die Sitz und Rücken des Autosicherheitssitzes zusammenhalten. Ziehen Sie die

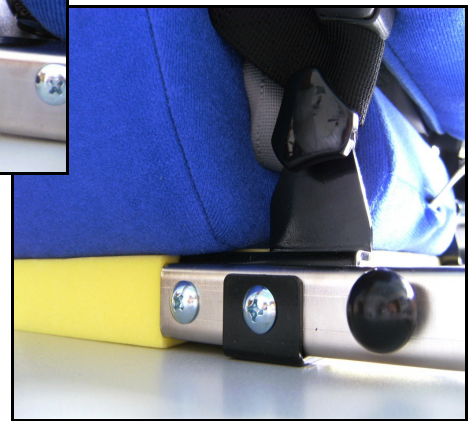

Schrauben von beiden Seiten fest an.

2. Ordnungsmäßiges Fixieren am Autositz mit ISOFIX-Verbindung

Setzen Sie nun die ISO-BASE mit dem befestigten Carrot 3/ Carrot XL auf den Autositz. Beachten Sie hierbei, dass die ISOFIX-Verbindung der ISO-BASE und die des Fahrzeugs auf einer Höhe liegen. Stecken Sie die ISO-BASE in die ISOFIX-Verbindung des Autositzes bis diese hörbar auf beiden Seiten einrastet.

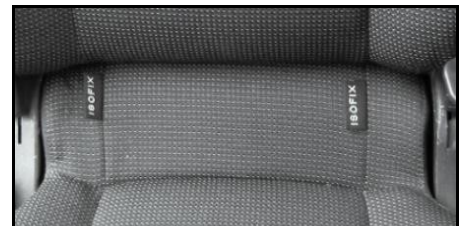

Nun ist die ISO-BASE sicher mit dem Auto verbunden.

3. Entfernen der ISO-BASE

Zum Entfernen der ISO-BASE, muss die ISOFIX-Verbindung gelöst werden. Entriegeln Sie die Schnappverschlüsse an beiden Seiten der ISO-BASE und ziehen Sie die ISOFIX-Verbindung heraus. Nun können Sie die ISO-BASE zusammen mit dem Carrot 3 / Carrot XL aus dem Fahrzeug heben.

Garantie

1. Für das Produkt wird während der Garantiezeit im Falle eines Schadens durch einen Defekt des Materials garantiert.
2. Die Dauer der Garantie beschränkt sich auf zwei Jahre nach dem Erwerb des Produktes.
3. Die Garantie deckt folgende Fälle nicht ab:
 - x Fehlerhafter und unsachgemäßer Gebrauch
 - x Produktveränderung
 - x Schaden durch Unfälle
 - x Der Garantieschein ist ohne Namen und Stempel des Fachhändlers, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
 - x Falls Sie den Garantieschein nicht vorlegen können
4. Die Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt in Deutschland, Österreich und in der Schweiz eingerichtet wurde.

Instandhaltungsservice: Wenn ein Problem während der Garantiezeit auftritt, setzen Sie sich bitte mit dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, in Verbindung. Sie müssen ihm den Garantieschein vorlegen.

ACHTUNG: Der Garantieschein wird nicht ersetzt. Bewahren Sie ihn gut auf.

<u>GARANTIESCHEIN</u>			
Modell	ISO-Base mit ISOFIX-Verbindung		
Kunde	Adresse		
	Name	Tel.	
Datum des Erwerbs			
Fachhändler			
Alleinvertrieb: RehaNorm GmbH & Co. KG * Am Ockenheimer Graben 50 * 55411 Bingen			